



## INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- CCH001-19

SUSTITUYE A:	VIGENCIA:	PROXIMA REVISIÓN:
Nuevo	3 años	JUL-2028
ELABORÓ:  Areli Jazmín Guevara Galindo Producción FECHA: 29-JUL-2025	REVISÓ:  I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 29-JUL-2025	AUTORIZÓ:  I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 29-JUL-2025

### 1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Plato ovalado	1
2	Apósito transparente IV	1
3	Toalla impregnada alcohol isopropílico al 70%	5
4	Gasas 7.5x5 cm	2
5	Solución antiséptica. Clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%	1
6	Guantes para exploración	2
7	Envoltura plana	1
8	Cubre boca de alta filtración con resorte	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

### 2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (Cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

**COPIA CONTROLADA**

No. 1

PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19



VERSIÓN:





01

CÓDIGO:

IEPR- CCH001-19

**3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:**

1	Colocar sobre la mesa de trabajo 1 plato ovalado.	2	Colocar 1 Apósito transparente IV
 		 	
Criterio:	Se coloca horizontalmente sobre la mesa.	Criterio:	Se coloca sobre el plato.

3	Colocar 5 toallas impregnadas alcohol isopropílico.	4	Colocar 2 gasas de 7.5X cm.
 		 	
Criterio:	Se colocan 5 alcoholes sobre el apósito de lado izquierdo.	Criterio:	Se colocan 2 gasas en el lado derecho en la costilla hacia enfrente.



PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:









CCH001-19

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

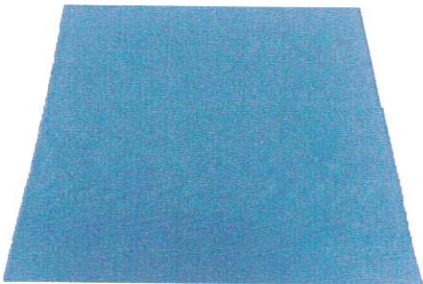IEPR- CCH001-19

5	Colocar 1 Aplicador de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%.	6	Colocar 2 guantes medianos.
 		 	
Criterio:	Se coloca centrado 1 Aplicador de clorhexidina.	Criterio:	Se colocan un par de guantes con los dedos en dirección a la izquierda.
7	Envoltura plana	8	Se acomoda el equipo a envolver sobre la envoltura
 		 	
Criterio:	Colocar una envoltura sobre la mesa.	Criterio:	Se coloca el kit sobre la envoltura horizontalmente.



PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR- CCH001-19

- 9 Doblar la punta inferior (B) de la envoltura hacia arriba y dar un pequeño doble hacia dentro y jalar la punta (A) hacia arriba.

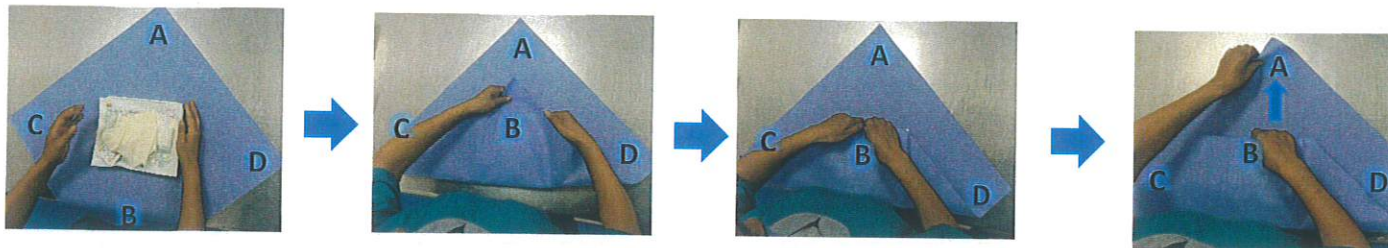


Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado

- 10 En el punto C se deberá doblar el costado para después subir la pestaña hacia el centro.

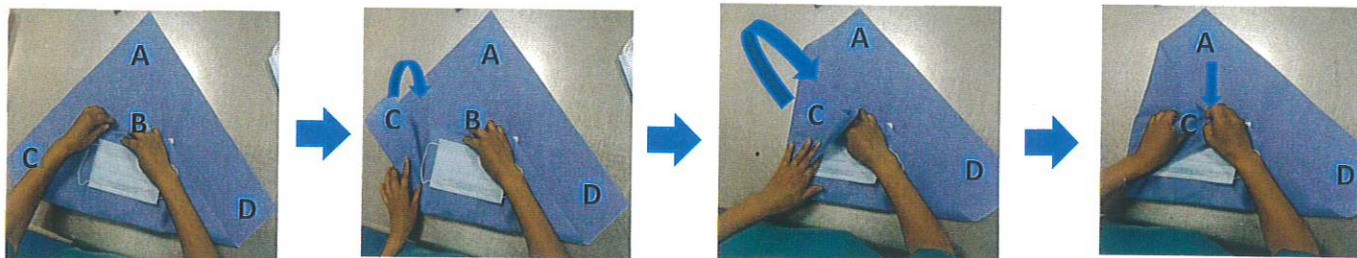

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado.

- 11 En el punto D se deberá doblar el costado para después subir la pestaña hacia el centro de manera que las pestañas C y D al reunirse en el centro se realice un triángulo en la punta A.

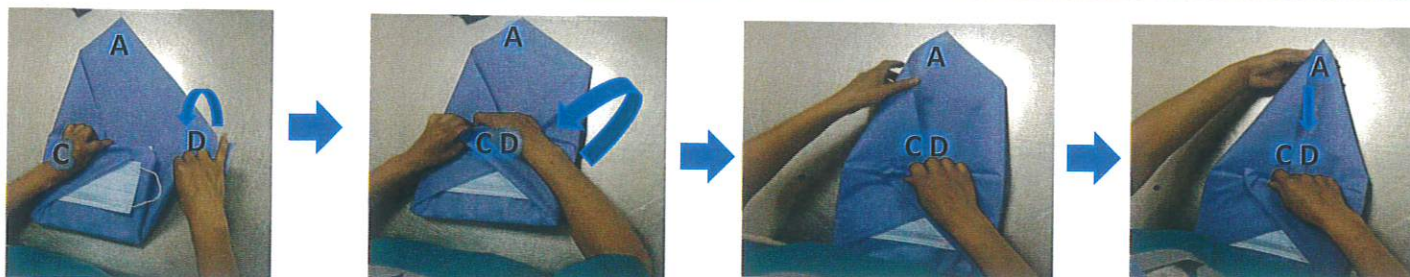

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.



PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- CCH001-19

- 12 Girar 180 ° el equipo ensamblado, bajar la punta A para dar un pequeño doble hacia dentro de los puntos C y D para formar la pestaña triangular (referencia).

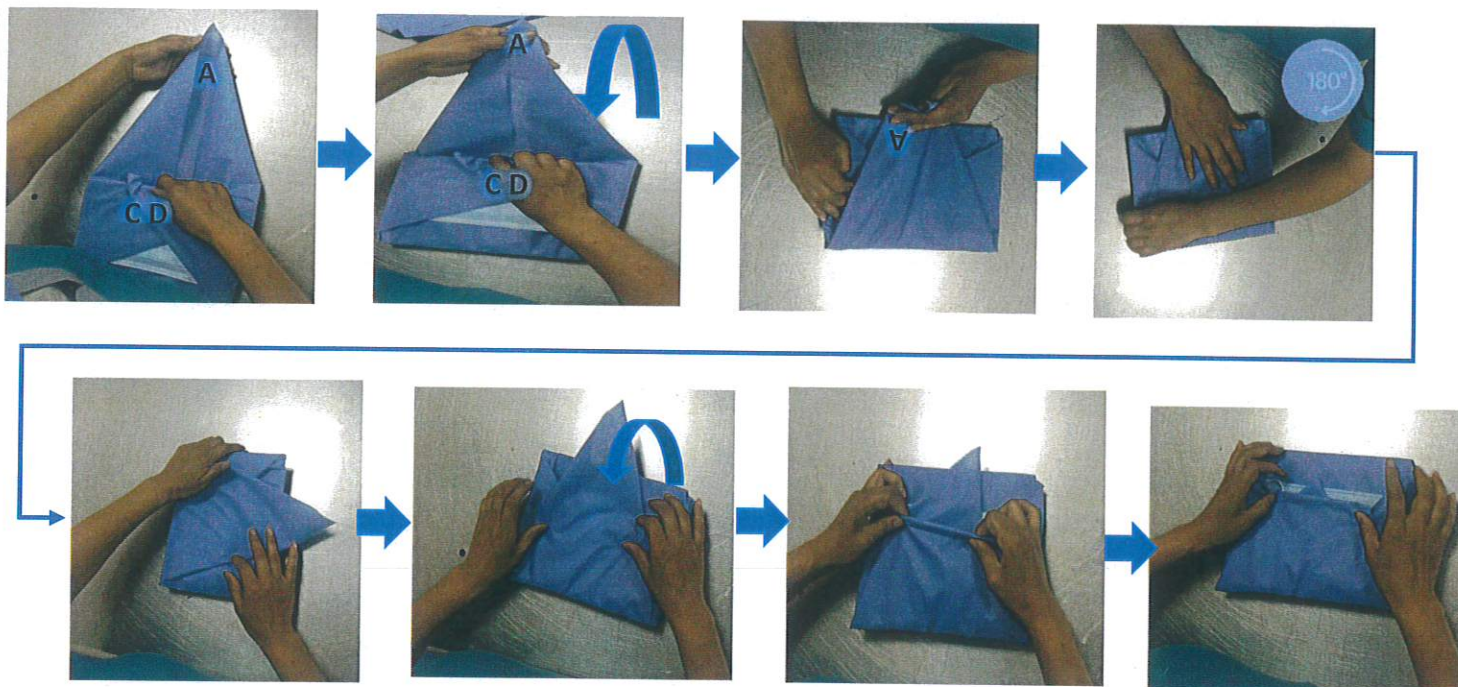

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva, para así obtener de resultado del kit ya terminado.

## 4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento (usar tapa si estos quedaran retenidos para su acondicionamiento subsecuente).

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A





## INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS- CCH001-19

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

ELABORÓ:

Nuevo

REVISÓ:

3 años

AUTORIZÓ:

JUL-2028

Areli Jazmín Guevara Galindo  
Producción

FECHA: 29-JUL-2025

I.Q.I Sergio Bautista Sampedro  
Coordinador de Producción

FECHA: 29-JUL-2025

I.I. Alan Christian Galicia Castillo  
Responsable Sanitario

FECHA: 29-JUL-2025

### 1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (aplica cuando lo solicite el cliente)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja cartón doble corrugado 54x29x28	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

### 2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Tijeras (Para el refile de la bolsa cuando aplique o para cortar cinta indicadora de esterilización)	Limpias y libre de contaminación.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (aplica cuando el cliente lo solicite)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación.
Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación.
Máquina precintadora	29 cm de alto x 28.5 cm de ancho para el sellado.





PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS- CCH001-19

## 3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (Bolsa)	2	Introducir el producto dentro del empaque primario
			
Criterio:	No debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar al centro de manera horizontal o vertical. NOTA: Solo se coloca la cinta testigo en la etiqueta cuando el cliente lo solicite.	Criterio:	Como se muestra en la imagen
3	Sellar el empaque primario mínimo a 1 cm de la apertura de la bolsa con la máquina selladora	4	Almacenar en los contenedores
			
Criterio:	No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Cuando aplique para manipulación y transporte



**PRODUCTO:**

**CURACION DE CATETER I.V HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19


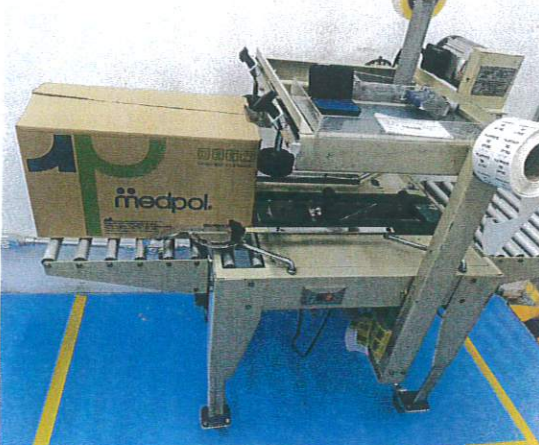
VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS- CCH001-19

**4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:**

1	Empacar como se muestra en la imagen	2	Sellar la caja con la maquina precintadora
			
Criterio:	Colocar de frente cada producto película vs película, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "Restos-Caja Parcial" en esquina superior derecha Colocar el sello en la parte inferior derecha del empaque secundario, indicando los últimos tres dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Cinta indicadora de esterilización

ETIQUETA DE RESTOS

Sello

**FORMATO DEL SELLO**

**COD DD MM AA**

**COD:** Código de la máquina.

**DD:** DIA  
Los 2 dígitos del día.

**MM:** MES  
Los 2 dígitos del mes.

**AA:** AÑO  
Últimos 2 dígitos del año.

**0 2 9 0 4 0 4 2 5**

**EJEMPLO**

Criterio:	La etiqueta no debe tener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar el sello como se muestra en la imagen. La caja no debe estar rota, sucia o manchada.
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS- CCH001-19

4 Estibar conforme a la imagen 6 camas de 7 cajas y 1 cama de 8 cajas

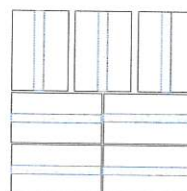

Cama 1

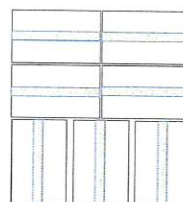

Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100x120cm

### 5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento (usar tapa si estos quedaran retenidos para su acondicionamiento subsecuente).

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A

  
**Innplast**   
**COPIA CONTROLADA**  
No. 1