

		INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO			
PRODUCTO: ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr					
CATÁLOGO:	EAS201-26	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IEPR- EAS201-26
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
Nuevo		3 años		ABR- 2028	
ELABORÓ:  Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 04- ABR- 2025		REVISÓ:  I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 04- ABR- 2025		AUTORIZÓ:  I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 04- ABR- 2025	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Plato ovalado	1
2	Recipiente sin tapa de 236 ml (8 oz)	1
3	Toalla para secado de manos	1
4	Gasas de 10 x 10 cm	2
5	Guantes medianos para exploración	2
6	Envoltura 57 x 57 cm	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (Cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-26

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- EAS201-26

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

1	Colocar sobre la mesa de trabajo 1 plato ovalado	2	Colocar un recipiente sin tapa de 236 ml (8 oz)
 		 	
Criterio:	Se coloca horizontalmente.	Criterio:	Se coloca de lado derecho del plato

3	Colocar 2 gasas de 10 x 10 cm sobre el plato ovalado	4	Colocar 1 toalla para secado de manos sobre las 2 gasas y el deposito
 		 	
Criterio:	Se coloca a la izquierda del plato ovalado.	Criterio:	Las costillas de la toalla para secado de manos están orientadas al lado derecho y parte superior.

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-26

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR- EAS201-26

5 Colocar 2 guantes medianos para exploración

Vista Superior



Vista Frontal

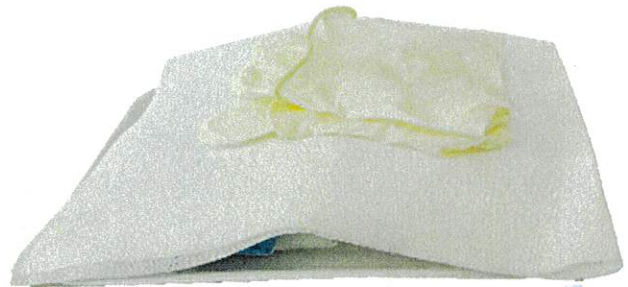


Criterio: Los dedos del guante apuntan a la izquierda.

innplast
COPIA CONTROLADA


No. 1

6 Sobre la mesa de trabajo se coloca la envoltura

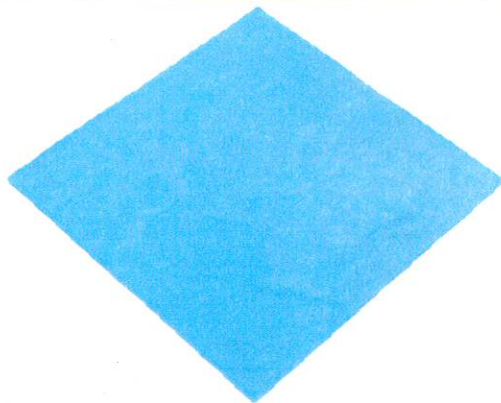

Criterio: La envoltura se coloca en forma de rombo.

7 Se acomoda el equipo a envolver sobre la envoltura

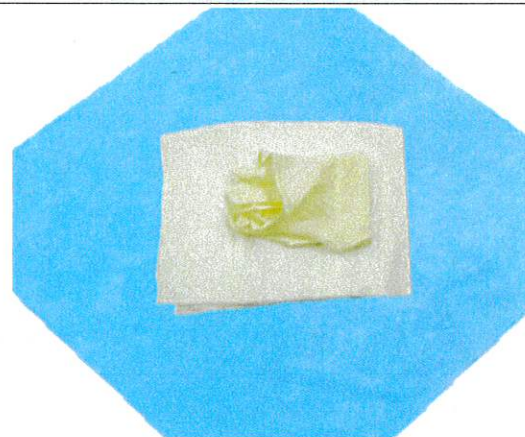

Criterio: Acomodar el equipo ensamblado como se muestra en el paso No. 7

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-26


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- EAS201-26

8 Envolver. Doblar la punta inferior de la envoltura hacia arriba y dar un pequeño dobles hacia dentro del punto A y B

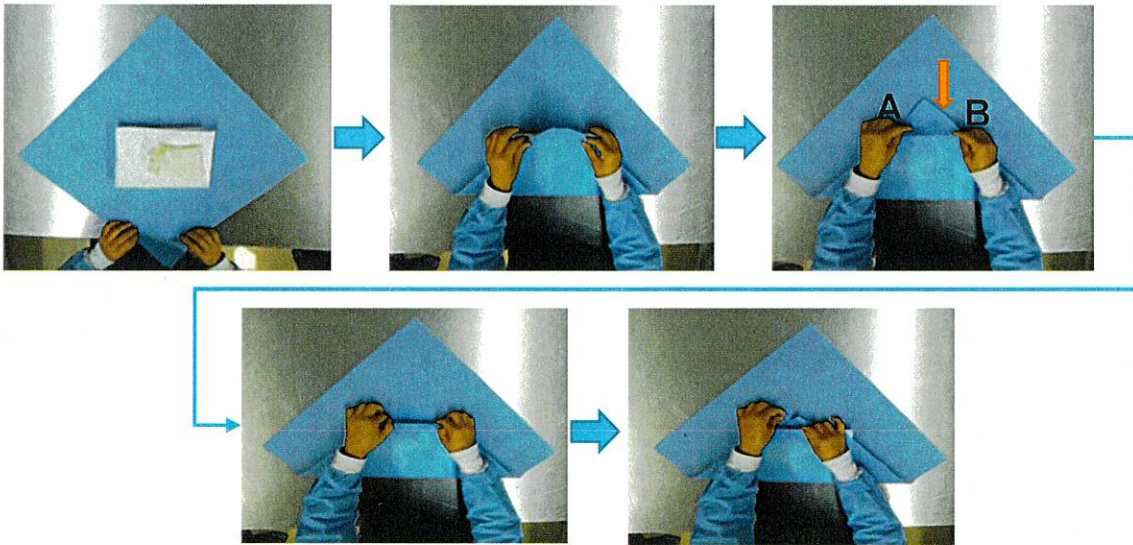


Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado.


COPIA CONTROLADA

9 Del punto C realizar un pequeño dobles hacia dentro, para formar una pestaña. Del punto D doblar la pestaña hacia la izquierda y sujetar.

No. 1

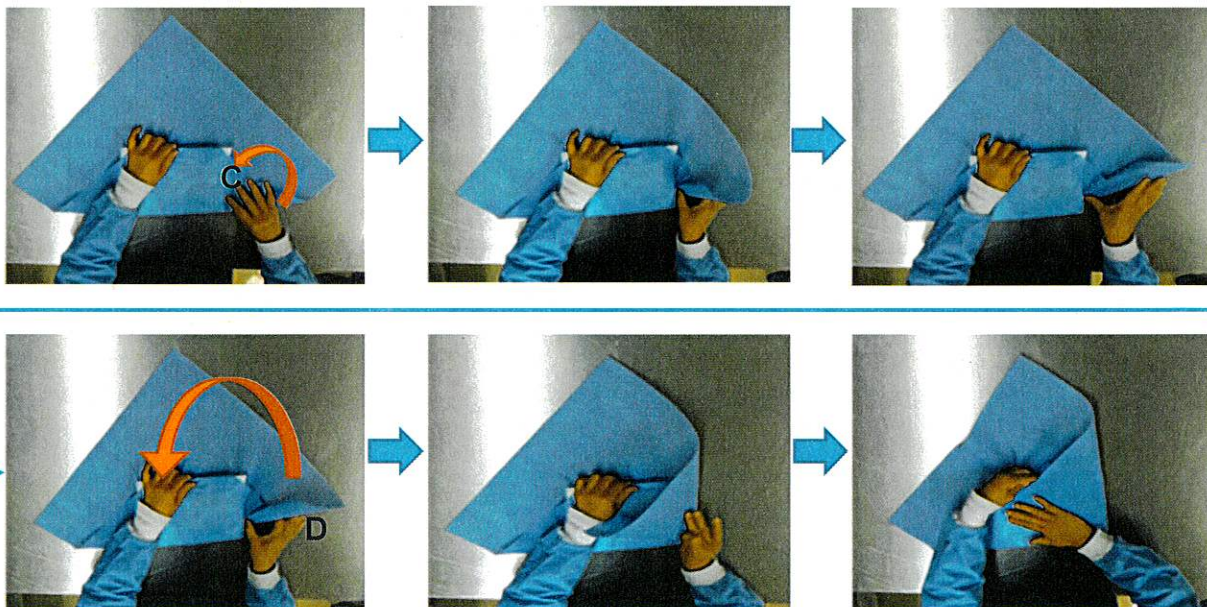

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-26

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR- EAS201-26

10

Del punto E realizar un pequeño doble hacia dentro, para formar una pestaña.
Del punto F doblar la pestaña hacia la derecha y sujetar.

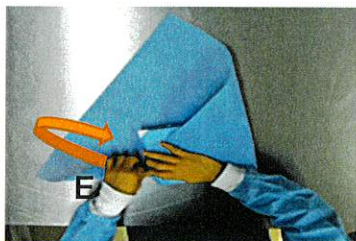

Criterio:

Apretar el equipo con la envoltura.

11

Dar un pequeño doble hacia dentro de los puntos G y H para formar la pestaña triangular.



Criterio:

No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-26


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR- EAS201-26

12 Tomar la punta de la pestaña (punto H) y doblar hacia la parte inferior.

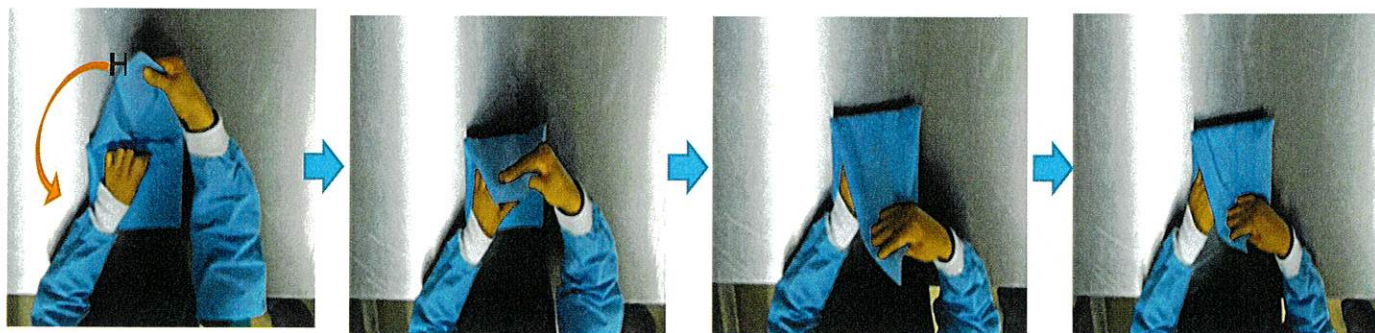

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

13 Girar 180 ° el equipo ensamblado

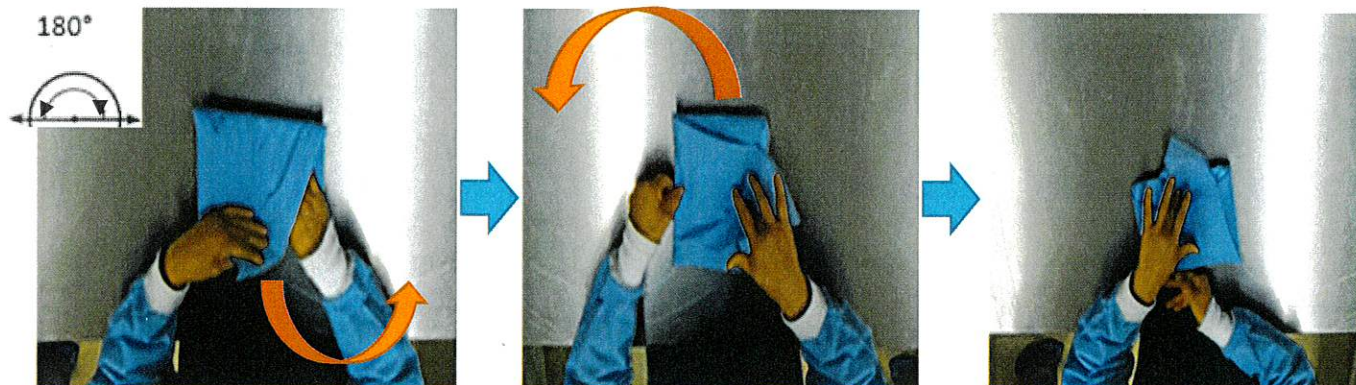

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-26


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- EAS201-26

14 Dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos I y J para formar la pestaña triangular (referencia)

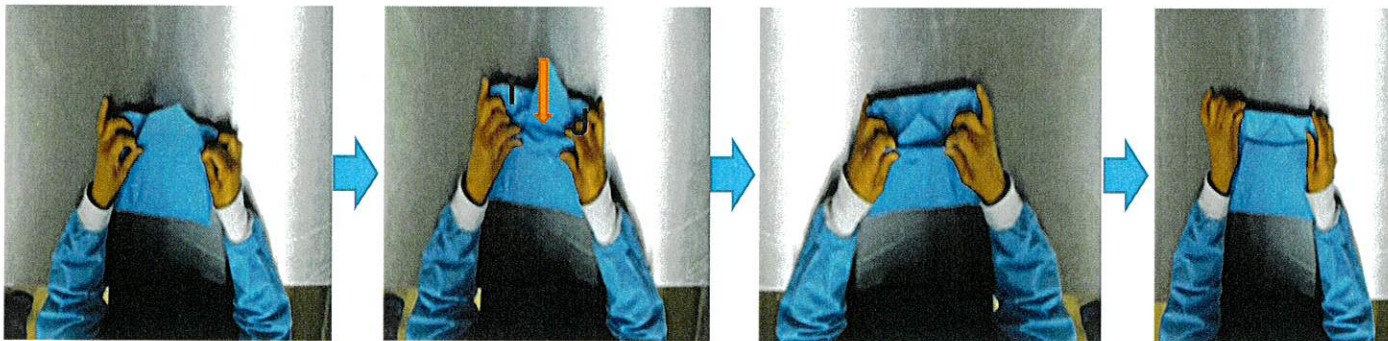

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

15 Presentación final de la envoltura del equipo



Criterio: El equipo envuelto no debe quedar flojo.



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-26

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- EAS201-26

4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.





Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A


Innplast 
COPIA CONTROLADA

No. 1

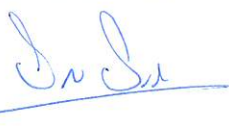		INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO			
PRODUCTO:					
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr					
CATÁLOGO:	EAS201-26	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-EAS201-26
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
Nuevo		3 años		ABR-2028	
ELABORÓ:  Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 04- ABR- 2025		REVISÓ:  I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 04- ABR- 2025		AUTORIZÓ:  I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 04- ABR- 2025	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (aplica cuando lo solicite el cliente)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja cartón doble corrugado 54x29x28 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas
Contenedores de manipulación y transporte (Cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón
Despachador de cinta indicadora de esterilización (aplica cuando el cliente lo solicite)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación
Tijeras (Para el refile de bolsa cuando aplique o para cortar la cinta indicadora de esterilización)	Limpias y libre de contaminación
Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación
Máquina precintadora	29 cm de alto x 28.5 cm de ancho para el sellado.


Innplast 
COPIA CONTROLADA
 No. 1

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-26

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-EAS201-26

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa)	2	Introducir el producto dentro del empaque primario
			
Criterio:	No debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar al centro de manera horizontal o vertical. NOTA: Solo se coloca la cinta testigo en la etiqueta cuando el cliente lo solicite.	Criterio:	Como se muestra en la imagen
3	Sellar el empaque primario mínimo a 1 cm de la apertura de la bolsa con la máquina selladora	4	Almacenar en los contenedores
			
Criterio:	Pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Cuando aplique para manipulación y transporte

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-26

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-EAS201-26


4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen	2	Sellar la caja con la maquina precintadora
			
Criterio:	Colocar de frente cada producto película vs película, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque	Criterio:	Como se muestra en la imagen

- 3 Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización
En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "Restos-Caja Parcial" en esquina superior derecha
Colocar el sello en la parte inferior derecha del empaque secundario, indicando los últimos tres dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento



FORMATO DEL SELLO

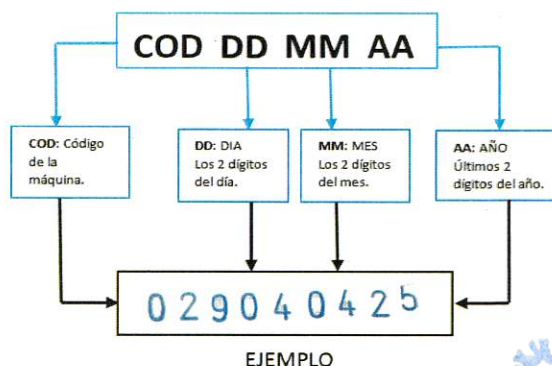

Criterio: La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen
La caja no debe estar, rota, sucia o manchada

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-26


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-EAS201-26

4 Estibar conforme a la imagen: máximo 7 camas. Seis camas con 7 cajas cada una y una cama con 8 cajas

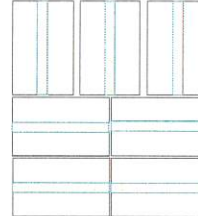

Cama 1

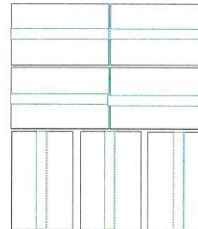

Cama 2

Criterio:

ESTIBA: T-100x120cm

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se exponga a la humedad mayor a 65%.
- Empaque primario frágil manipular con cuidado.
- Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A