


		INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO			
PRODUCTO:					
CIRUGIA FINA					
CATÁLOGO:	CFI001-04	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IEPR- CFI001-04
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
NUEVO		3 años		JUN - 2028	
ELABORÓ:  Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 13 - JUN - 2025		REVISÓ:  I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 13 - JUN - 2025		AUTORIZÓ:  I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 13 - JUN - 2025	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Plato ovalado	1
2	Toalla impregnada de alcohol isopropilico	5
3	Hoja de bisturí nº15 carbón Steel	1
4	Mango de bisturí nº3 acero inoxidable	1
5	Pinza adson con dientes	1
6	Tijera iris curva	1
7	Porta agujas mayo hegar	1
8	Pinza mosco curva	4
9	Depósito de plástico 8oz sin tapa	2
10	Campo 57x57cm fenestrado central 7.5x7.5cm	1
11	Envoltura plana 57x57 cm	1

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (Cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, cartón.

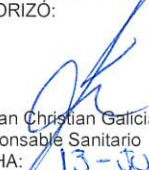

innplast

COPIA CONTROLADA

No. 1



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

CIRUGIA FINA

CATÁLOGO:

CFI001-04

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- CFI001-04

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

1	Colocar plato ovalado	2	Colocar 5 toallas impregnadas de alcohol isopropílico
			
Criterio:	Se coloca de forma horizontal en la mesa de trabajo.	Criterio:	Se colocan 5 toallas de alcohol de lado izquierdo.

3	Colocar una hoja de bisturí n°15 carbón Steel	4	Colocar un mango de bisturí n°3 acero inoxidable
			
Criterio:	Como indica la imagen.	Criterio:	Como indica la imagen.



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

CIRUGIA FINA

CATÁLOGO:




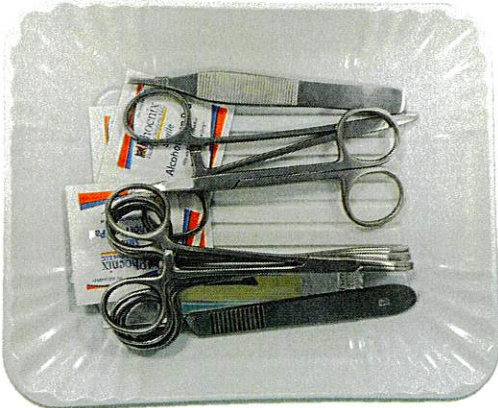
CFI001-04

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- CFI001-04

5	Colocar una pinza adson con dientes	6	Colocar una pinza iris curva
			
Criterio: Como indica la imagen.		Criterio: Como indica la imagen	
7	Colocar un porta agujas mayo hegar	8	Colocar 4 pinzas mosco curva No. <u>1</u>
			
Criterio: Como indica la imagen		Criterio: Como indica la imagen	

innplast  medbo
COPIA CONTROLADA

PRODUCTO:

CIRUGIA FINA

CATÁLOGO:

CFI001-04

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR- CFI001-04

9 Colocar 2 depósitos de plástico 8oz sin tapa

10 Colocar un campo 57x57cm fenest central 7.5x7.5cm

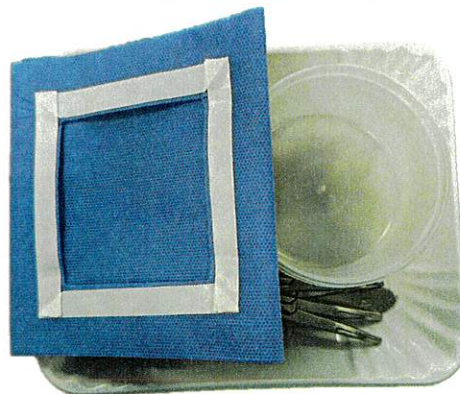

Criterio: De lado derecho se colocan los 2 depósitos.

Criterio: De lado izquierdo se coloca el campo.

11 Kit ensamblado

12 Colocar una envoltura plana 57x57 cm



Criterio: Como indica la imagen

Criterio: Se coloca el equipo sobre la envoltura para empezar a envolver.

PRODUCTO:

CIRUGIA FINA

CATÁLOGO:

CFI001-04


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:



IEPR- CFI001-04

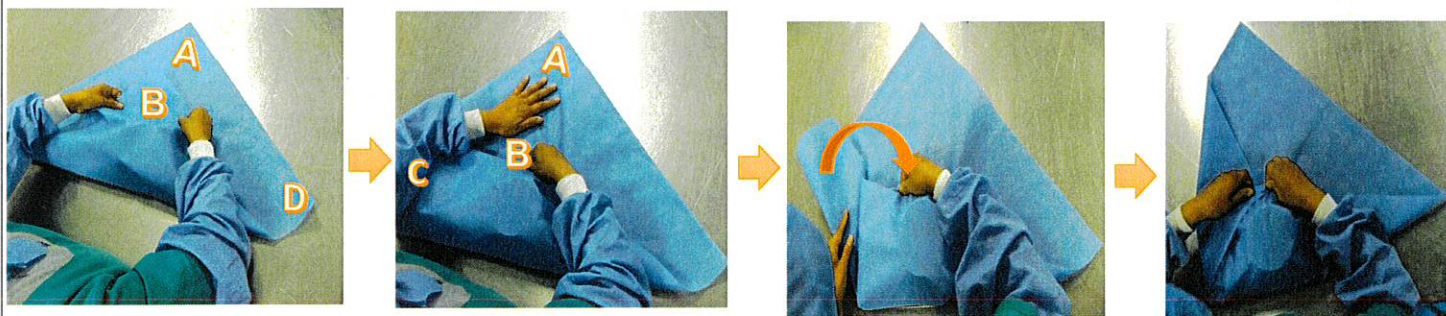- 13 Doblar la punta inferior (B) de la envoltura hacia arriba y dar un pequeño doble hacia dentro debajo del plato.




Criterio:

Apretar el equipo con la envoltura.

 **innplast** 
COPIA CONTROLADA
No. 1

- 14 El punto C y D se dobla los costados individualmente para después subir la pestaña y unir las en el centro.

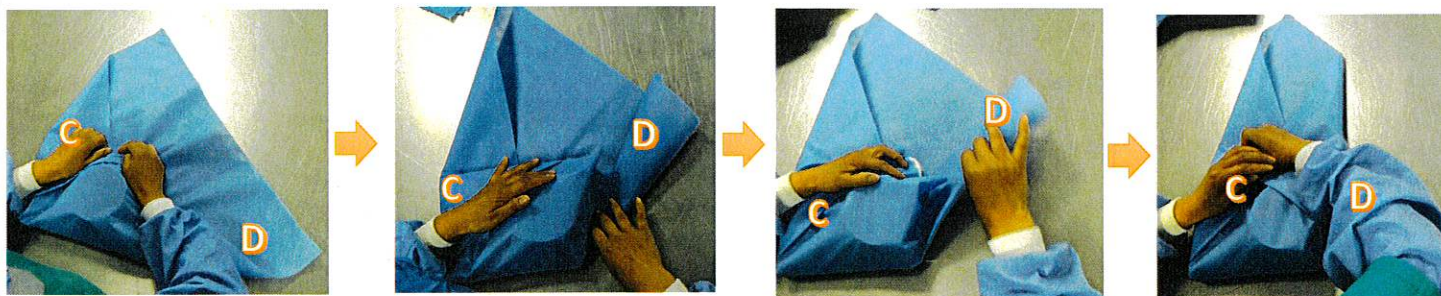

No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva

PRODUCTO:

CIRUGIA FINA

CATÁLOGO:

CFI001-04


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- CFI001-04


- 15 Dar un pequeño doblé hacia dentro de los puntos C y D para formar la pestaña triangular.

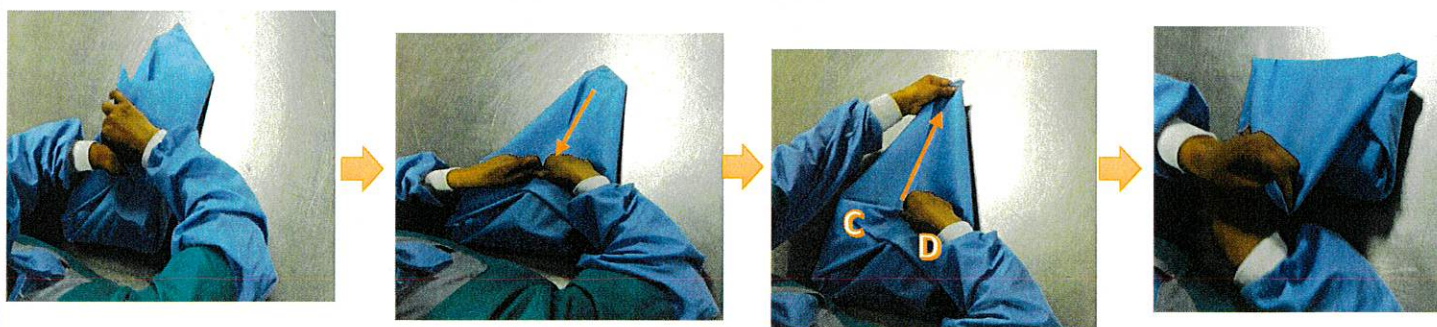

Criterio:

No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

- 16 Girar 180 ° el equipo ensamblado, Dar un pequeño doblé hacia dentro de los puntos C y D para formar la pestaña triangular (referencia).

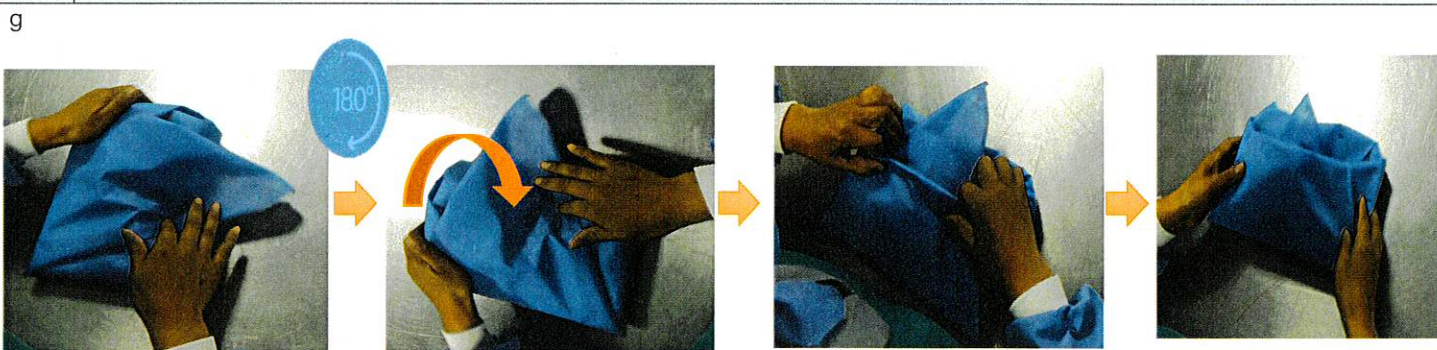


Criterio:

No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.


innplast 
COPIA CONTROLADA

No. 1

		INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO			
PRODUCTO:					
CIRUGIA FINA					
CATÁLOGO:	CFI001-04	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IEPR- CFI001-04





4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.
No se exponga a la humedad mayor a 65%.
Empaque primario frágil manipular con cuidado.
Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A



COPIA CONTROLADA
No. 1

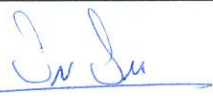		INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO			
PRODUCTO:					
CIRUGIA FINA					
CATÁLOGO:	CFI001-04	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-CFI001-04
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
Nuevo		3 años		JUN - 2028	
ELABORÓ:  Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 13-JUN-2025		REVISÓ:  I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 13-JUN-2025		AUTORIZÓ:  I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 13-JUN-2025	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (aplica cuando lo solicite el cliente)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja cartón doble corrugado 54x29x28	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, cartón.
Tijeras (para el refile de bolsa cuando aplique o para cortar la cinta indicadora de esterilización)	Limpias y libre de contaminación.
Despachador de cinta testigo de esterilización (aplica cuando el cliente solicite la cinta)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación.

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta testigo de esterilización (Opcional el uso tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación.
Máquina precintadora	29 cm de alto x 28.5 cm de ancho para el sellado

PRODUCTO:

CIRUGIA FINA

CATÁLOGO:

CFI001-04

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS- CFI001-04

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa)	2	Introducir el producto dentro del empaque primario
			
Criterio:	No debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar al centro de manera horizontal o vertical. Colocar testigo de viraje en el recuadro de la etiqueta cuando aplique	Criterio:	Como se muestra en la imagen
3	Sellar el empaque primario mínimo a 1 cm de la apertura de la bolsa con la máquina selladora	4	Almacenar en contenedores
			
Criterio:	No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Cuando aplique para manipulación y transporte

PRODUCTO:

CIRUGIA FINA

CATÁLOGO:

CFI001-04

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IAPS- CFI001-04

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen	2	Sellar la caja con la maquina precintadora
			
Criterio:	Colocar de frente cada producto película vs película, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque	Criterio:	Como se muestra en la imagen

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con el testigo o indicador de esterilización Si hay restos (caja parcia colocar la etiqueta en la esquina superior derecha) Colocar el sello en la parte inferior derecha que indica el código de la máquina, el día, el mes y el año en que empa	No. <u>1</u>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Cinta indicadora de esterilización</p> <p>Etiqueta de restos</p> <p>Sello</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>FORMATO DEL SELLO</p> <pre> graph TD A[COD DD MM AA] --> B[COD: Código de la máquina.] A --> C[DD: DIA Los 2 dígitos del día.] A --> D[MM: MES Los 2 dígitos del mes.] A --> E[AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año.] B --> F[029040425] C --> F D --> F E --> F </pre> <p>EJEMPLO</p> </div> </div>		
Criterio:	La etiqueta No debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen con sello de código y fecha.	



INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

CIRUGIA FINA

CATÁLOGO:

CFI001-04


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS- CFI001-04

4 Estibar conforme a la imagen 6 camas de 7 cajas y 1 cama de 8 cajas

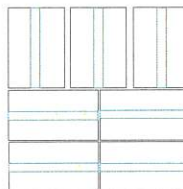

Cama 1

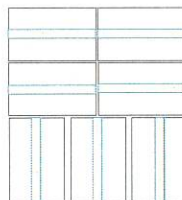

Cama 2

Criterio:

ESTIBA: T-100 x 120 cm

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A

Innplast 
COPIA CONTROLADA

No. 1