


		<b>INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO</b>			
<b>PRODUCTO:</b> CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA					
CATÁLOGO:	CCH001-19	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IEPR- CCH001-19
<b>SUSTITUYE A:</b> Nuevo		<b>VIGENCIA:</b> 3 años		<b>PROXIMA REVISIÓN:</b> JUL - 2028	
<b>ELABORÓ:</b>  Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 29-JUL-2025		<b>REVISÓ:</b>  I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 29-JUL-2025		<b>AUTORIZÓ:</b>  I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 29-JUL-2025	

## 1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Plato ovalado	1
2	Apósito transparente IV	1
3	Toalla impregnada alcohol isopropílico al 70%	5
4	Gasas 7.5x5 cm	2
5	Solución antiséptica. Clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%	1
6	Guantes para exploración	2
7	Envoltura plana	1
8	Cubre boca de alta filtración con resorte	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

## 2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (Cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.


  
**COPIA CONTROLADA**  
 No. 1

PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19









VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- CCH001-19

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

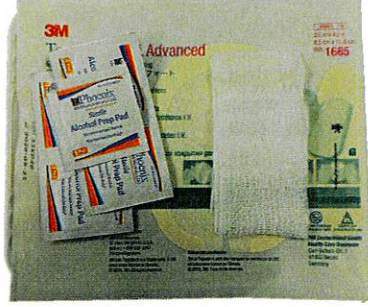1	Colocar sobre la mesa de trabajo 1 plato ovalado.	2	Colocar 1 Apósito transparente IV
 		 	
Criterio:	Se coloca horizontalmente sobre la mesa.	Criterio:	Se coloca sobre el plato.
3	Colocar 5 toallas impregnadas alcohol isopropílico.	4	Colocar 2 gasas de 7.5X cm. No. <u>1</u>
 		 	
Criterio:	Se colocan 5 alcoholes sobre el apósito de lado izquierdo.	Criterio:	Se colocan 2 gasas en el lado derecho con la costilla hacia enfrente.



**PRODUCTO:**

**CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- CCH001-19

5 Colocar 1 Aplicador de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%.

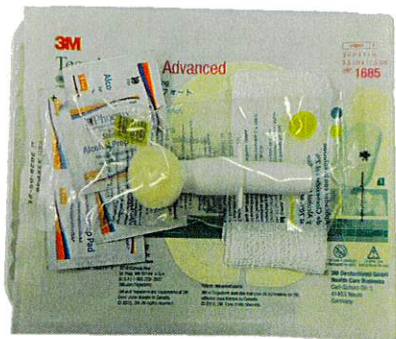

Criterio: Se coloca centrado 1 Aplicador de clorhexidina.

6 Colocar 2 guantes medianos.



Criterio: Se colocan un par de guantes con los dedos en dirección a la izquierda.

7 Envoltura plana



Criterio: Colocar una envoltura sobre la mesa.

8 Se acomoda el equipo a envolver sobre la envoltura



Criterio: Se coloca el kit sobre la envoltura horizontalmente.



PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR- CCH001-19

- 9 Doblar la punta inferior (B) de la envoltura hacia arriba y dar un pequeño doble hacia dentro y jalar la punta (A) hacia arriba.

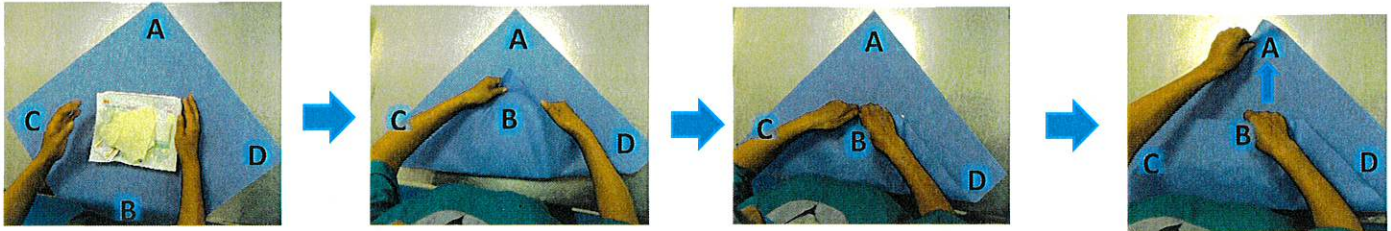


Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado

- 10 Colocar un cubrebocas sobre el punto B y en el punto C se deberá doblar el costado para después subir la pestaña hacia el centro.

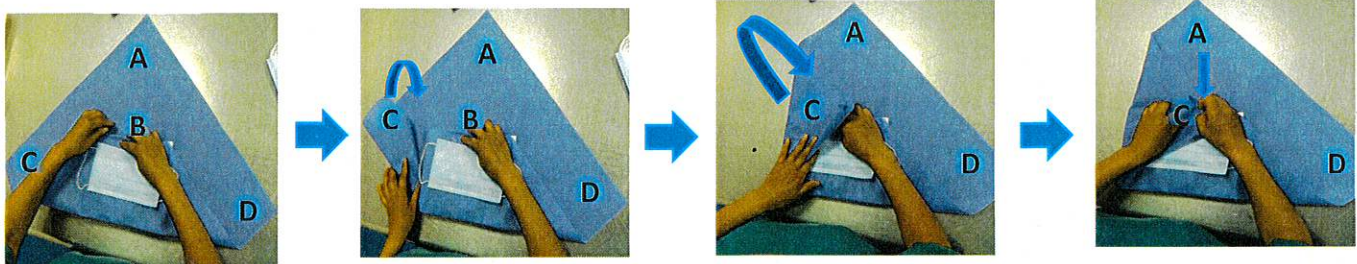

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado.

- 11 En el punto D se deberá doblar el costado para después subir la pestaña hacia el centro de manera que las pestañas C y D al reunirse en el centro se realice un triángulo en la punta A.

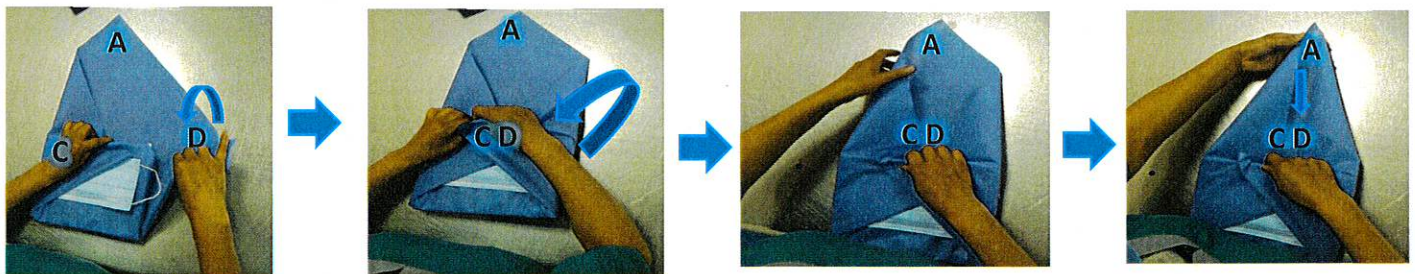

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.



PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- CCH001-19

- 12 Girar 180 ° el equipo ensamblado, bajar la punta A para dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos C y D para formar la pestaña triangular (referencia).

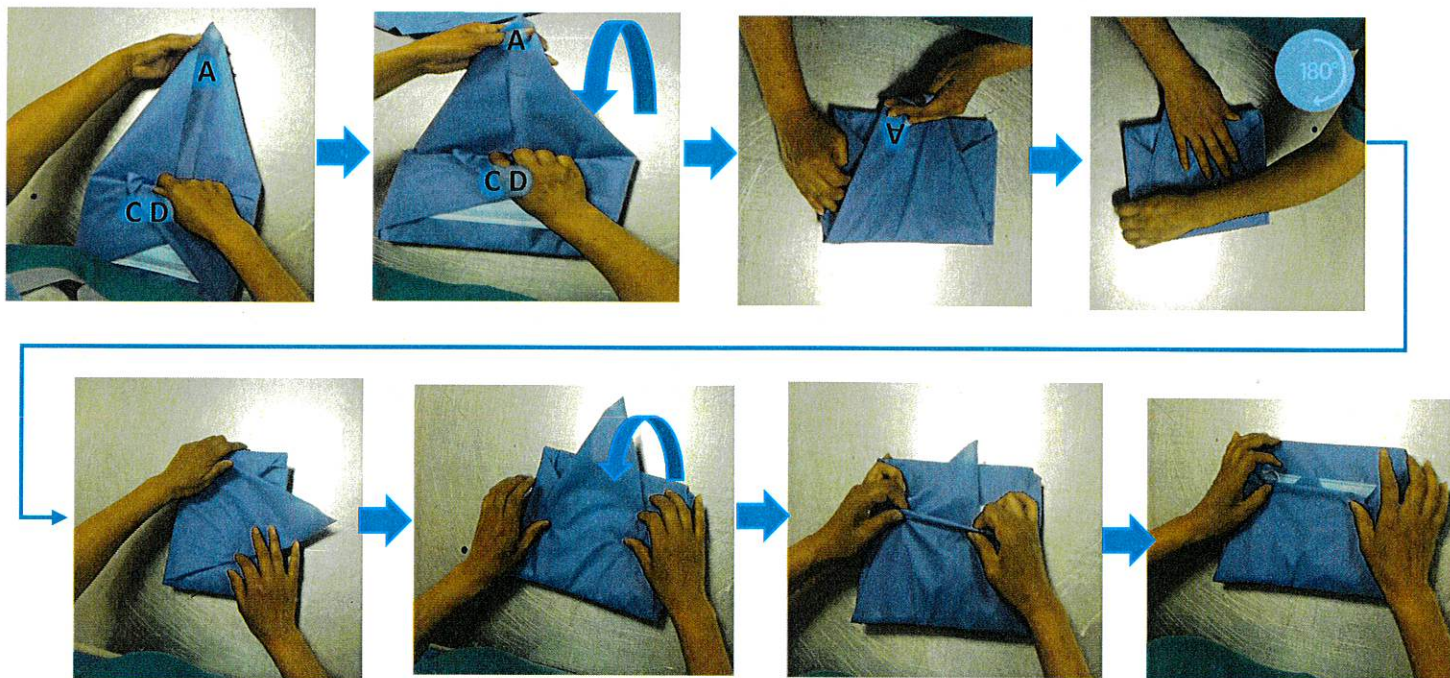

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva, para así obtener de resultado del kit ya terminado.

#### 4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:





Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A



		<b>INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO</b>			
<b>PRODUCTO:</b>					
<b>CURACION DE CATETER I.V. HENDIDO Y CLORHEXIDINA</b>					
CATÁLOGO:	CCH001-19	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS- CCH001-19
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
Nueva		3 años		Jul- 2028	
ELABORÓ:  Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 29- JUL- 2025		REVISÓ:  I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 29- JUL- 2025		AUTORIZÓ:  I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 29- JUL- 2025	

#### 1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (aplica cuando lo solicite el cliente)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja cartón doble corrugado 54x29x28	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

#### 2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Tijeras (Para el refile de la bolsa cuando aplique o para cortar cinta indicadora de esterilización)	Limpias y libre de contaminación.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (aplica cuando el cliente lo solicite)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación.

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación.
Máquina precintadora	29 cm de alto x 28.5 cm de ancho para el sellado.



PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS- CCH001-19

**3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:**

1	Etiquetar el empaque primario (Bolsa)	2	Introducir el producto dentro del empaque primario
			
Criterio:	No debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar al centro de manera horizontal o vertical. NOTA: Solo se coloca la cinta testigo en la etiqueta cuando el cliente lo solicite.	Criterio:	Como se muestra en la imagen
3	Sellar el empaque primario mínimo a 1 cm de la apertura de la bolsa con la máquina selladora	4	Almacenar en los contenedores
			
Criterio:	No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Cuando aplique para manipulación y transporte



PRODUCTO:

**CURACION DE CATETER I.V HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19

VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS- CCH001-19

**4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:**

1	Empacar como se muestra en la imagen	2	Sellar la caja con la maquina precintadora
			
Criterio:	Colocar de frente cada producto película vs película, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "Restos-Caja Parcial" en esquina superior derecha Colocar el sello en la parte inferior derecha del empaque secundario, indicando los últimos tres dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionado
---	---

		<p><b>FORMATO DEL SELLO</b></p> <pre> graph TD     S[COD DD MM AA] --&gt; COD[COD: Código de la máquina.]     S --&gt; DD[DD: DIA Los 2 dígitos del día.]     S --&gt; MM[MM: MES Los 2 dígitos del mes.]     S --&gt; AA[AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año.]     COD --&gt; E[029040425]     DD --&gt; E     MM --&gt; E     AA --&gt; E     </pre> <p><b>EJEMPLO</b></p>
Criterio:	La etiqueta no debe tener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar el sello como se muestra en la imagen. La caja no debe estar rota, sucia o manchada.	

**PRODUCTO:**
**CURACION DE CATETER I.V HENDIDO Y CLORHEXIDINA**

CATÁLOGO:

CCH001-19


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS- CCH001-19

4 Estibar conforme a la imagen 6 camas de 7 cajas y 1 cama de 8 cajas

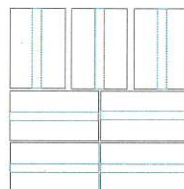

Cama 1

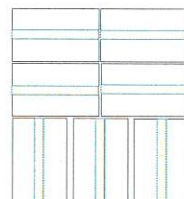

Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100x120cm

**5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:**

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A