


		INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO			
PRODUCTO:					
NUTRICION DE BEBÉ					
CATÁLOGO:	NUA001-33	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IEPR-NUA001-33
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
NUEVO		3 años		AGO-2028	
ELABORÓ:  Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 01-AGO-2025		REVISÓ:  I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 01-AGO-2025		AUTORIZÓ:  I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 01-AGO-2025	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Riñón graduado de 500 ml	1
2	Recipientes de 59 ml (2oz)	2
3	Gasas de 5x5 cm	2
4	Envoltura línea 50x50cm	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.



COPIA CONTROLADA
No. 1

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33





VERSIÓN:






01

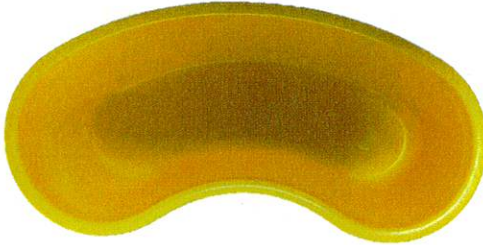CÓDIGO:

IEPR-NUA001-33

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

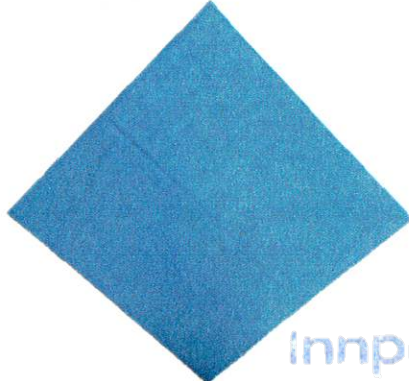1	Colocar un riñón graduado de 500 ml	2	Colocar 2 Gasas de 5x5 cm
 		 	
Criterio:	Se coloca horizontalmente	Criterio:	Como se muestra en la imagen

3	Colocar 2 recipientes de 59 ml (2oz)	4	Sobre la mesa de trabajo se coloca la envoltura línea 50x50cm
 		  <div style="text-align: right;">  <p>COPIA CONTROLADA</p> <p>No. <u>1</u></p> </div>	
Criterio:	Como se muestra en la imagen	Criterio:	La envoltura se coloca en forma de rombo.

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-NUA001-33

5 Se acomoda el equipo a envolver sobre la envoltura

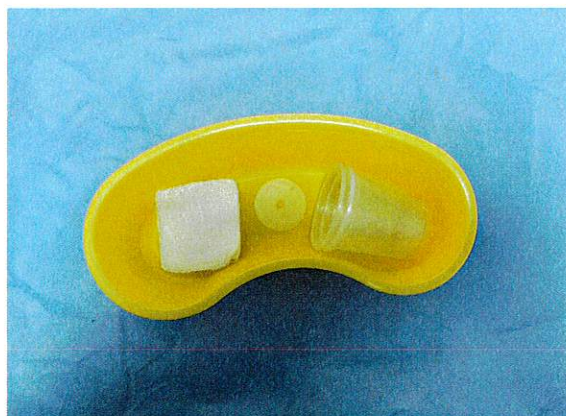


Criterio: Acomodar el equipo ensamblado como se muestra en el paso 3

6 Envolver. Doblar la punta inferior (Punto A) de la envoltura hacia arriba y doblar hacia abajo del riñón

Innplast 
COPIA CONTROLADA

No. 1

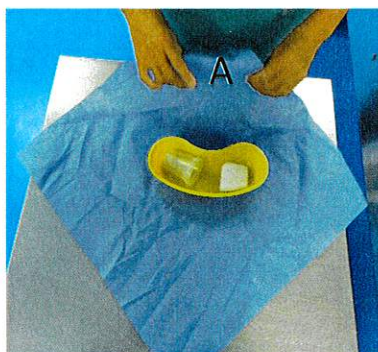

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-NUA001-33

7 Del punto C realizar un pequeño doblez hacia dentro para formar una pestaña. Pasando por arriba del kit manteniéndolo sujeto

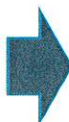

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado

8 Del punto E realizar un pequeño doblez hacia dentro, para formar una pestaña, Pasar por arriba del kit juntando la punta E y C

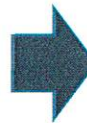

Criterio: Apretar el equipo con la envoltura.

 **Innplast** 
COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33



VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-NUA001-33

9 Juntar y dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos C y E para formar la pestaña triangular.

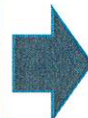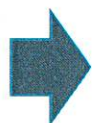

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

10 Girar 180 ° el equipo ensamblado

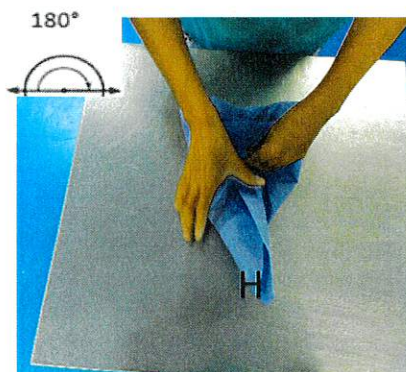

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

 **innplast** 
COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-NUA001-33

11 Tomar la punta de la pestaña (punto H) y doblar hacia la parte inferior.



Criterio: Como se muestra en la imagen

12 Resultado final del ensamble.



Criterio: No debe quedar flojo

4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:





Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

 
COPIA CONTROLADA
 No. 1

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A

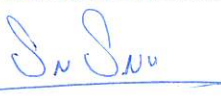		INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO			
PRODUCTO:					
NUTRICION DE BEBÉ					
CATÁLOGO:	NUA001-33	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-NUA001-33
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
Nuevo		3 años		AGO-2028	
ELABORÓ:  Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 01-AGO-2025		REVISÓ:  I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 01-AGO-2025		AUTORIZÓ:  I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 01-AGO-2025	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (aplica cuando lo solicite el cliente)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja cartón doble corrugado 54x29x28	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (Cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación.
Tijeras (para el refile de bolsa cuando aplique o para cortar la cinta indicadora de esterilización)	Limpias y libre de contaminación

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación.
Máquina precintadora	30 cm de ancho x 29 cm de alto



innplast

COPIA CONTROLADA

 No. 1

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33

VERSIÓN:



01

CÓDIGO:

IAPS-NUA001-33

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa)	2	Introducir el producto dentro del empaque primario
			
Criterio:	Al colocar la etiqueta no debe presentar algún daño físico que afecte su legibilidad. Nota: solo se coloca la cinta testigo en la etiqueta cuando sea requerida.	Criterio:	Como se muestra en la imagen

3	Sellar el empaque primario mínimo a 1 cm de la apertura de la bolsa con la máquina selladora	4	Almacenar en los contenedores
			
Criterio:	No debe tener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Cuando aplique para manipulación y transporte

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IAPS-NUA001-33

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen	2	Sellar la caja con la maquina precintadora
			
Criterio:	Colocar de frente cada producto película vs película, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque	Criterio:	Como se muestra en la imagen

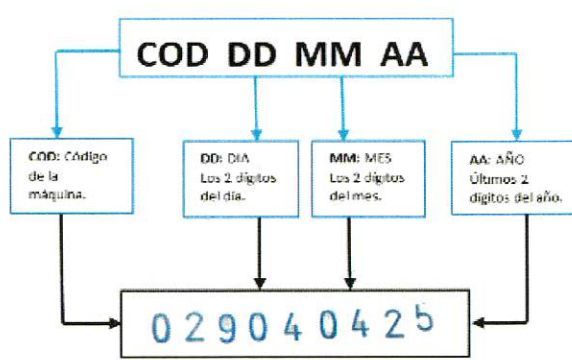3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "Restos-caja parcial" en esquina superior derecha Colocar el sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.	<p>FORMATO DEL SELLO</p>  <p>EJEMPLO</p>
Criterio:	<p>La etiqueta debe estar libre de cualquier tipo de daño físico (arrugas, pliegues, cortes) que afecte su legibilidad. La caja no debe estar rota, sucia o con alguna imperfección que dañe el empaque primario.</p> <p>El sello indica los últimos tres dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en la que se realizó el acontecimiento.</p>	



INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

NUTRICION DE BEBÉ

CATÁLOGO:

NUA001-33


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-NUA001-33

4 Estibar conforme a la imagen: máximo 7 camas. Seis camas con 7 cajas cada una y una cama con 8 cajas

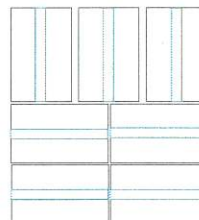

Cama 1

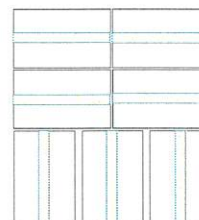

Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100cmx120cm

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A


innplast 
COPIA CONTROLADA
No. 1