

PRODUCTO:
UNIFORME PARA CIRUGANO UNITALLA
CATÁLOGO:

PCU009-55

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-PCU009-55

|SUSTITUYE A:
VIGENCIA:
PROXIMA REVISIÓN:
ELABORÓ:


Carolina Hernández Hernández
Producción

FECHA: 29-AGO-2025

REVISÓ:


IQI. Sergio Bautista Sampedro
Coordinador de Producción

FECHA: 29-AGO-2025

AUTORIZÓ:


QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva
Responsable Sanitario

FECHA: 29-AGO-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Pantalón con costura de refuerzo entre piernas ,filipina cuello en v y bias alrededor	1
2	Gorro para cirujano	1
3	Cubreboca	1
4	Par de zapatones o botas desechables	1
Observaciones: Descripciones especificas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Banda transportadora	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

PRODUCTO:

UNIFORME PARA CIRUJANO UNITALLA

CATÁLOGO:

PCU009-55

VERSIÓN:

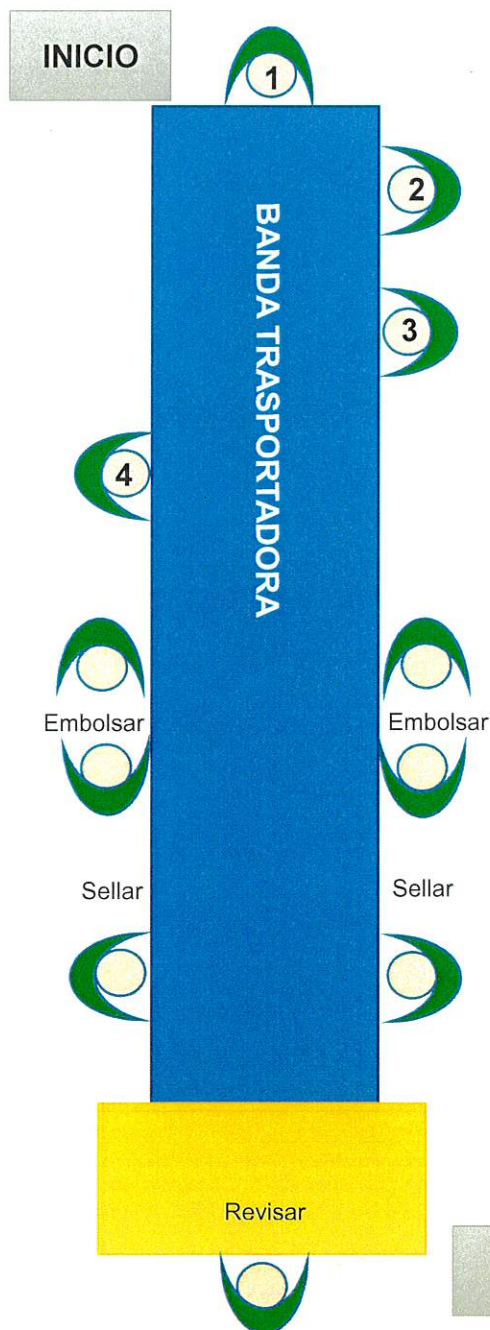
01

CÓDIGO:

IEPR-PCU009-55

3. LECCIÓN DE UN PUNTO

Para la operación de la banda transportadora, acomodar a los operadores para la colocación de los componentes del uniforme para cirujano unitalla como se muestra en el diagrama.



Ensamble uniforme para cirujano unitalla

Ítem	Insumo	Cantidad
1	Pantalón con costura de refuerzo entre piernas ,filipina cuello en v y bias alrededor	1
2	Gorro para cirujano	1
3	Cubreboca	1
4	Par de zapatones o botas desechables	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

Fecha:

Supervisor de producción (Firma):

Fecha:

Inspector de calidad (Firma):

PRODUCTO:

UNIFORME PARA CIRUGANO UNITALLA

CATÁLOGO:

PCU009-55

VERSIÓN:


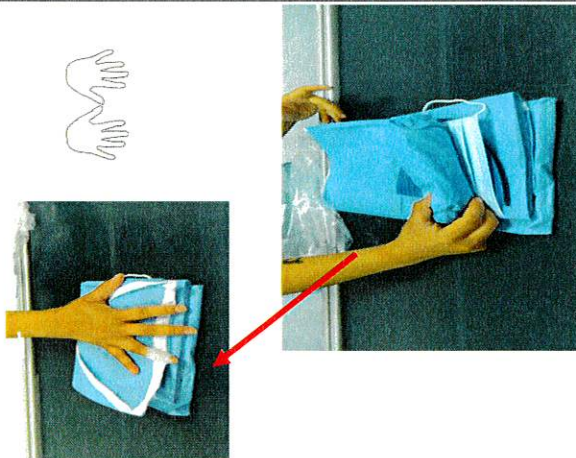
01

CÓDIGO:

IEPR-PCU009-55

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

1	Colocar sobre la banda transportadora 1 pantalón con costura de refuerzo entre piernas con filipina cuello en v y bies alrededor.	2	Colocar 1 gorro para cirujano.
			
Criterio:	Colocar la filipina abierta con el cuello del lado izquierdo y junto con ella el pantalón quedando del lado derecho.	Criterio:	Colocar encima del pantalón doblada a la mitad.

3	Colocar 1 cubreboca.	4	Colocar 1 par de zapatones o botas desechables.
			
Criterio:	Se coloca encima del gorro para cirujano.		Por último se coloca 1 par de zapatones o botas desechables encima del cubrebocas y se cierra.

PRODUCTO:

UNIFORME PARA CIRUGANO UNITALLA

CATÁLOGO:


PCU009-55

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-PCU009-55

5	Producto final ensamblado.
 <p>Cubrebocas</p> <p>Gorro</p> <p>Zapatones o botas</p> <p>Pantalón</p> <p>Filipina</p>	
Criterio:	Todo el material queda dentro de la filipina.

6 No lleva proceso de envoltura.

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:



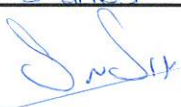

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A

		INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO			
PRODUCTO: UNIFORME PARA CIRUGANO UNITALLA					
CATÁLOGO:	PCU009-55	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-PCU009-55
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
Nuevo		3 años		AGO-2028	
ELABORÓ:  Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 29-AGO-2025		REVISÓ:  IQI. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 29-AGO-2025		AUTORIZÓ:  QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva Responsable Sanitario FECHA: 29-AGO-2025	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa impresa de polietileno	1
2	Etiqueta primaria	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja doble corrugado 57x45x33 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora por impulso	Tiempo de sellado: 3 a 9 seg. Tiempo de enfriamiento: 3 a 9 seg.
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Máquina precintadora	46 cm de ancho x 34 cm de altura







Innplast 

COPIA CONTROLADA

 No. 1

PRODUCTO:
UNIFORME PARA CIRUJANO UNITALLA
CATÁLOGO:
PCU009-55
VERSIÓN:
01
CÓDIGO:
IAPS-PCU009-55
3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa).	2	Introducir el producto dentro del empaque primario.
			
Criterio:	La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad como arrugas, pliegues o cortaduras, colocar de forma horizontal.	Criterio:	Se introduce como se muestra en la imagen.
3	Sellar el empaque primario.	4	Almacenar en los contenedores.
			
Criterio:	No debe tener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello.	Criterio:	Para la manipulación y transporte.

PRODUCTO:

UNIFORME PARA CIRUGANO UNITALLA

CATÁLOGO:

PCU009-55

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IAPS-PCU009-55

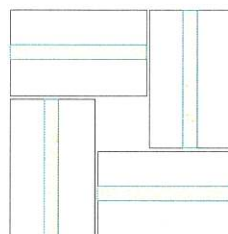
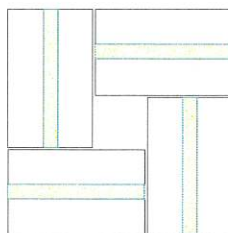
4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen.	2	Sellar la caja con la maquina precintadora.
			
Criterio:	Empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

3	<p>Colocar etiqueta secundaria al frente. En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha. Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.</p>
	<p>Formato de sello</p> <pre> graph TD Sello[COD DD MM AA] --> COD[COD: Código de la máquina.] Sello --> DD[DD: DIA Los 2 dígitos del día.] Sello --> MM[MM: MES Los 2 dígitos del mes.] Sello --> AA[AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año.] COD --> Ejemplo[029040425] DD --> Ejemplo MM --> Ejemplo AA --> Ejemplo </pre> <p>EJEMPLO</p>
Criterio:	<p>El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.</p>

PRODUCTO:
UNIFORME PARA CIRUGANO UNITALLA
CATÁLOGO:
PCU009-55
VERSIÓN:
01
CÓDIGO:
IAPS-PCU009-55

4 Estibar conforme a la imagen: máximo 6 camas. Seis camas con 4 cajas cada una.


Cama 1

Cama 2
Criterio:
ESTIBA: T-100 cm x120 cm
5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A