


		INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO			
PRODUCTO: EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER					
CATÁLOGO:	ERC201-27	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IEPR-ERC201-27
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
Nuevo		3 años		OCT-2028	
ELABORÓ:  Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 07-OCT-2025		REVISÓ:  IQI. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 08-OCT-2025		AUTORIZÓ:  QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva Responsable Sanitario FECHA: 09-OCT-2025	

## 1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Apósito transparente IV	1
2	Charola termoformada	1
3	Tijera fina para cirugía	1
4	Pinza de disección sin dientes	1
5	Gasas 10 x 10cm	5
6	Solución antiséptica clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70%	1
7	Guantes para exploración	2
8	Envoltura plana	1
9	Cubreboca de alta filtración con resorte	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

## 2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

PRODUCTO:

**EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER**

CATÁLOGO:

ERC201-27









VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-ERC201-27

**3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:**

1	Coloca sobre la mesa de trabajo 1 apósito transparente IV.	2	Colocar 1 charola termoformada.
 		 	
Criterio:	Se coloca de forma horizontal.	Criterio:	Se coloca sobre el apósito de forma horizontal.
3	Colocar 1 tijera finas para cirugía.	4	Colocar 1 pinza de disección sin dientes.
 		 	
Criterio:	Se coloca dentro de la charola termoformada de manera diagonal con la punta hacia el lado inferior derecho.	Criterio:	Se coloca dentro de la charola termoformada encima de las tijeras y en forma diagonal del lado contrario de las tijeras con la punta hacia el lado inferior izquierdo formando una x.



**PRODUCTO:**

**EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER**

CATÁLOGO:





ERC201-27





VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-ERC201-27

5	Colocar 5 gasas 10 x 10 cm.	6	Colocar 1 solución antiséptica clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70%.
 		 	
<p>Criterio: Se colocan encima de la pinza de disección sin dientes y de la charola termoformada.</p>		<p>Criterio: Se coloca encima de las gasas de 10 x 10 cm.</p>	

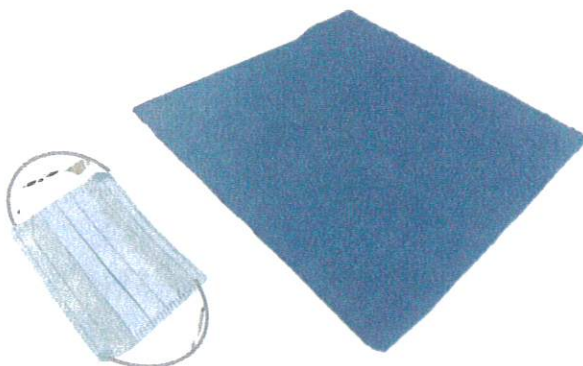7	Colocar 2 guantes para exploración.	8	Colocar sobre la mesa 1 envoltura plana y 1 cubrebocas de alta filtración con resorte.
 		 	
<p>Criterio: Se colocan encima de la solución antiséptica clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70% con los dedos de los guantes apuntando hacia el lado izquierdo.</p>		<p>Criterio: La envoltura se coloca en forma de rombo sobre la mesa de trabajo y junto a la envoltura a un "lado" un cubreboca de alta filtración con resorte.</p>	



PRODUCTO:

**EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER**

CATÁLOGO:

ERC201-27



VERSIÓN:

01

CÓDIGO:



IEPR-ERC201-27

9 Envolver: tomar la punta del punto A y doblar por arriba hacia el punto B cubriendo el material ensamblado.

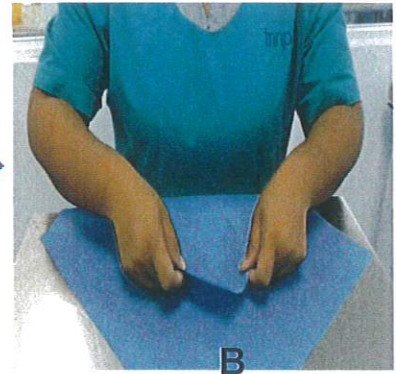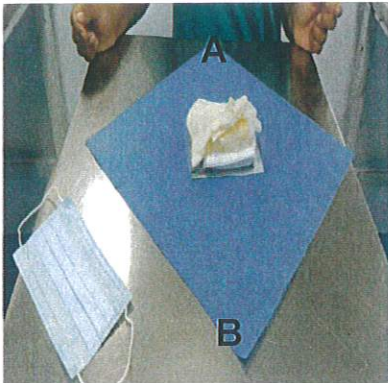

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado.

10 Introducir la punta de la pestaña por debajo del producto ensamblado jalando y apretando sin soltar ningún dobles, enseguida se le coloca un cubreboca de alta filtración con resorte encima del punto A.

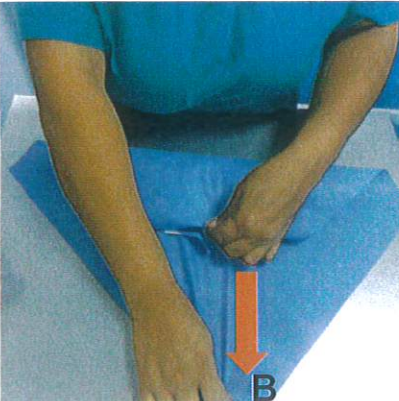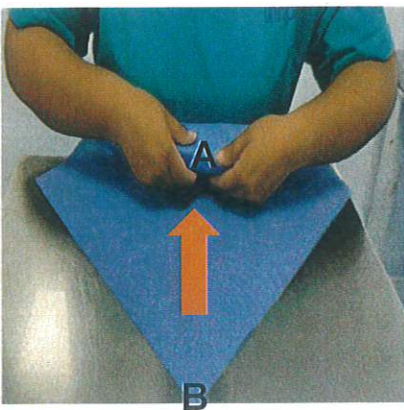

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado.



PRODUCTO:

**EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER**

CATÁLOGO:

ERC201-27

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR-ERC201-27

11

Del punto C se realiza un pequeño dobles hacia adentro para formar una pequeña pestaña sin soltar la pestaña se hará un dobles hacia el lado derecho cubriendo parte del cubrebocas apretando y sujetando el material ensamblado.

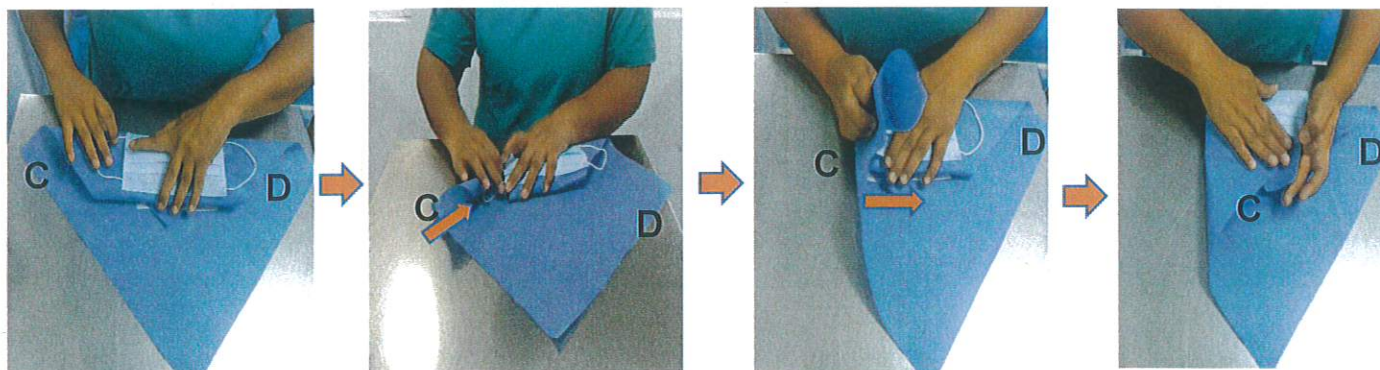


Criterio:

Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

12

Del punto D se realiza un pequeño dobles hacia dentro, para formar una pequeña pestaña, sin soltar la pestaña se hará un dobles hacia el lado izquierdo cubriendo parte del cubreboca apretando y sujetando el material ensamblado.

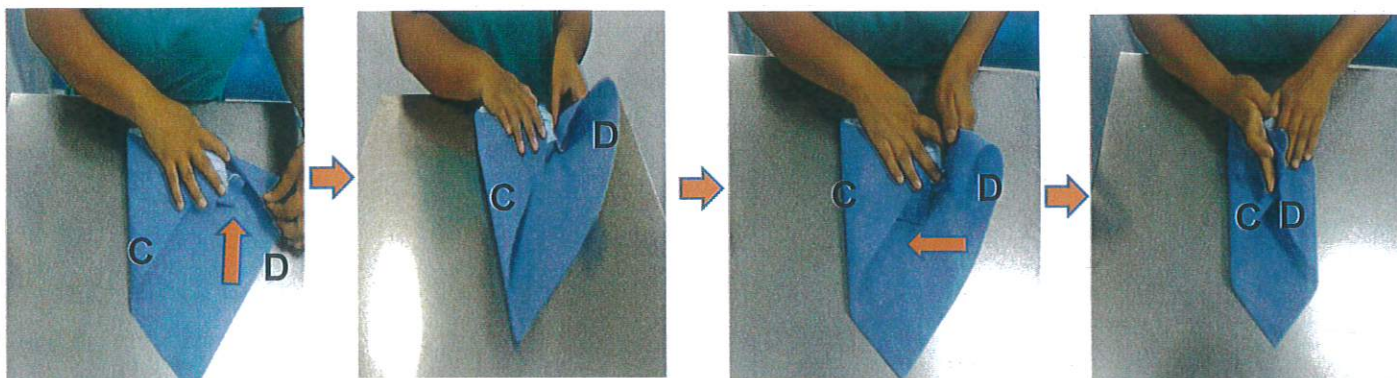

Criterio:

Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.



PRODUCTO:

**EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER**

CATÁLOGO:

ERC201-27

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-ERC201-27

- 13 Dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos C y D para formar la pestaña triangular.



Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

- 14 Tomar la punta de la pestaña en forma de triángulo (punto B) y doblar por arriba hacia el punto A cubriendo el paquete ensamblado y sin soltar girar a 180° el material.

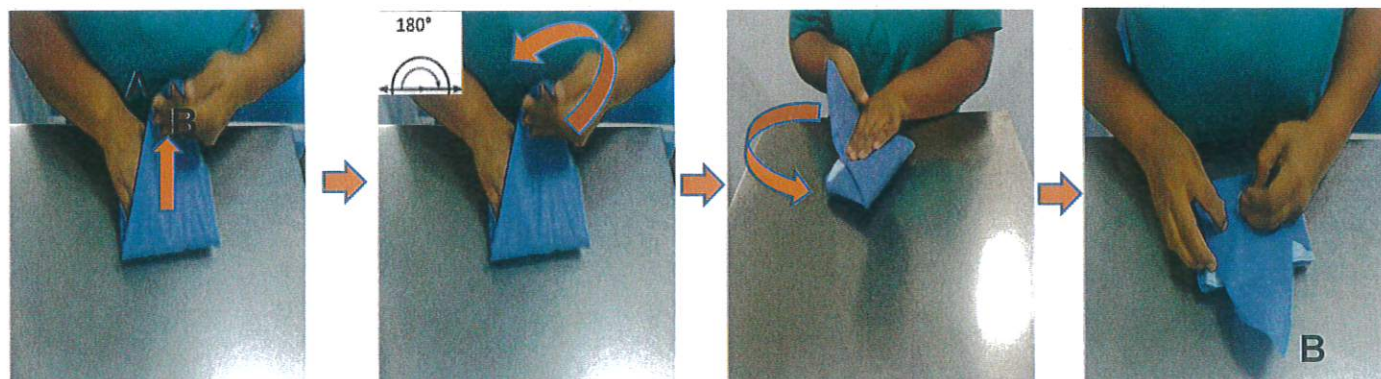

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.



PRODUCTO:

**EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER**

CATÁLOGO:

ERC201-27

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR-ERC201-27

15

Tomar la pestaña triangular (punto B) y dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos D y C dejando la punta de la pestaña triangular (referencia) como se muestra en la imagen (notándose la pestaña triangular y una parte del cubrebocas).

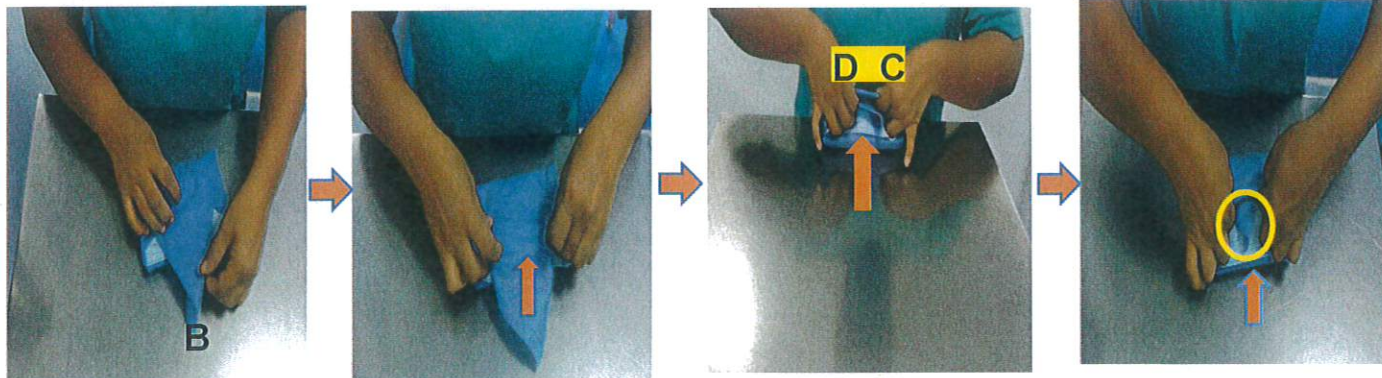


Criterio:

Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

16

Resultado final

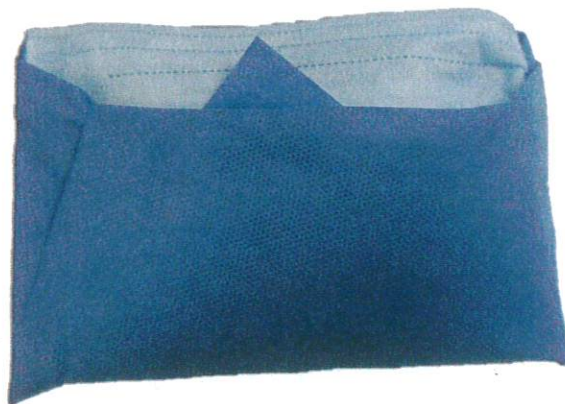

Criterio:

No debe quedar flojo.



## INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

### EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER

CATÁLOGO:

ERC201-27

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-ERC201-27

#### 4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A

  
innplast   
COPIA CONTROLADA  
No. 1





## INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

### EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER

CATÁLOGO:

ERC201-27

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-ERC201-27

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

Nuevo

3 años

OCT-2028

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Carolina Hernández Hernández  
Producción

IQI. Sergio Bautista Sampedro  
Coordinador de Producción

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva  
Responsable Sanitario

FECHA: 07-OCT-2025

FECHA: 08-OCT-2025

FECHA: 09-OCT-2025

#### 1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja doble corrugado 54x29x28 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

#### 2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.
Máquina precintadora	30 cm de ancho x 29 cm de altura

  
innplast   
COPIA CONTROLADA  
No. 1

PRODUCTO

EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER

CATÁLOGO:

ERC201-27



VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-ERC201-27

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa).	2	Introducir el producto dentro del empaque primario.
			
Criterio:	La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, se coloca de forma horizontal. Nota: la cinta indicadora de esterilización se coloca cuando sea requerido.	Criterio:	Se introduce el paquete ensamblado como se muestra en la imagen.
3	Sellar el empaque primario.	4	Almacenar en contenedores.
			
Criterio:	No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Para la manipulación y transporte.



PRODUCTO

EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER

CATÁLOGO:

ERC201-27

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IAPS-ERC201-27

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen.	2	Sellar la caja con la maquina precintadora.
			
Criterio:	Colocar de frente vs frente cada producto, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización. En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha. Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Identificación de etiqueta caja parcial</p> <p>Cinta indicadora de esterilización</p> <p>Sello</p> </div> <div> <p>Formato de sello</p> <pre> graph TD     A[COD DD MM AA] --&gt; B[COD: Código de la máquina.]     A --&gt; C[DD: DÍA Los 2 dígitos del día.]     A --&gt; D[MM: MES Los 2 dígitos del mes.]     A --&gt; E[AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año.]     B --&gt; F[029040425]     C --&gt; F     D --&gt; F     E --&gt; F             </pre> <p>EJEMPLO</p> </div> </div>	
Criterio:	El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.

## PRODUCTO

### EQUIPO ESTÉRIL PARA RETIRO DE CATETER

CATÁLOGO:

ERC201-27


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-ERC201-27

- 4 Estibar conforme a la imagen: máximo 7 camas. Seis camas con 7 cajas cada una y una cama con 8 cajas.

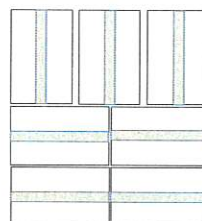

Cama 1

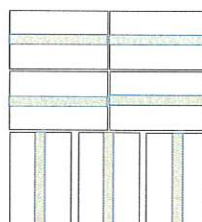

Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100 cm x120 cm

## 5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A