



## INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

### CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:

CUT001-02

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-CUT001-02

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

Nuevo

3 años

SEP-2028

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Carolina Hernández Hernández  
Producción

IQI. Sergio Bautista Sampedro  
Coordinador de Producción

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva  
Responsable Sanitario

FECHA: 09-SEP-2025

FECHA: 10-SEP-2025

FECHA: 11-SEP-2025

## 1. INSUMOS REQUERIDOS:

| Ensamble  |  |          |
|---|--|----------|
| Ítem  | Insumo   | Cantidad |
| 1   | Envoltura plana 40g de 37.5 x 40 cm                                    | 1        |
| 2   | Campos quirúrgicos de 80g de 40 x 70 cm con adhesivos para su fijación | 2        |
| Observaciones: Descripciones específicas en la OP |  |          |

## 2. EQUIPO A UTILIZAR:

| Ensamble   |  |
|--|--|
| Descripción  | Parámetros de uso  |
| Mesa de acero inoxidable                                   | Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas. |
| Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique) | Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.          |

PRODUCTO:

**CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL**

CATÁLOGO:

CUT001-02



VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR- CUT001-02

**3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:**
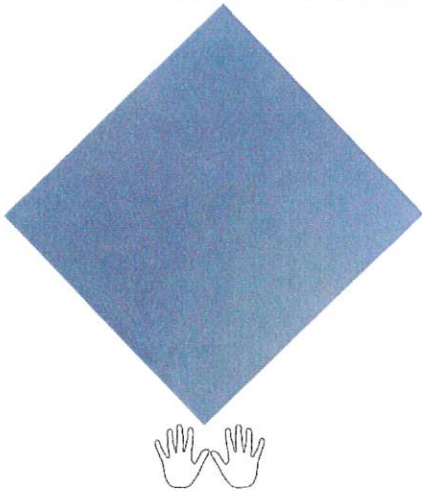
|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 1  | Colocar en la mesa de trabajo 1 envoltura plana 40g de 37.5 x 40 cm. | 2   | Colocar 2 campos quirúrgicos de 80g de 40 x 70 cm con adhesivos para su fijación. |
|  |  |  |   |
| Criterio:  | Se coloca en la mesa de trabajo en forma de rombo.                   | Criterio:   | Se colocan encima de la envoltura plana 40g de 37.5 x 40 cm.                      |
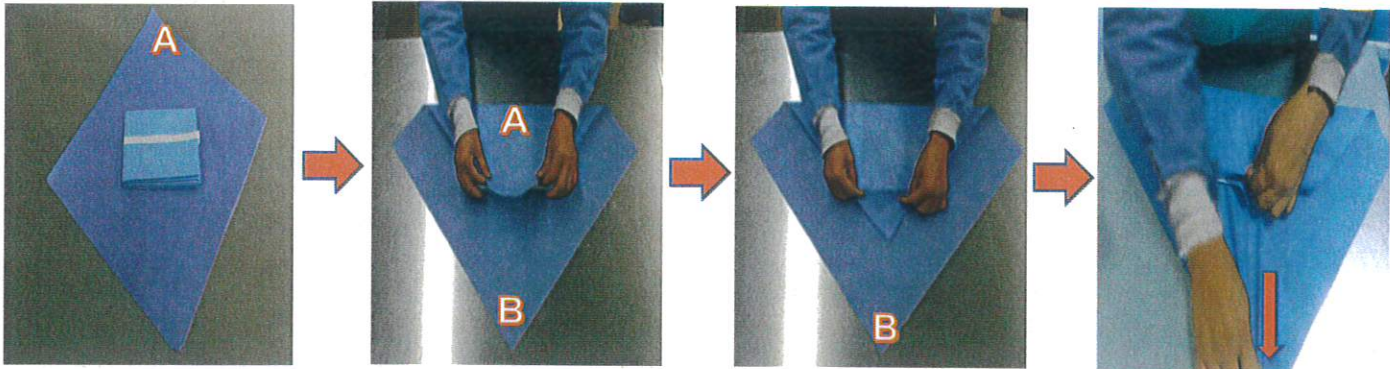
|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 3  | <p>Envolver: tomar la punta del punto A y doblar por arriba hacia el punto B cubriendo el material e Introduciendo la punta de la pestaña por debajo del producto jalando y apretando sin soltar ningún dobles.</p> |  |  |
|  |   |  |  |
| Criterio:  | Apretar con la envoltura el material.   |  |  |



PRODUCTO:

CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:

CUT001-02

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR- CUT001-02

4

Del punto C se realiza un pequeño doblez hacia dentro, para formar una pequeña pestaña, sin soltar la pestaña se hará un dobles de derecha a izquierda.

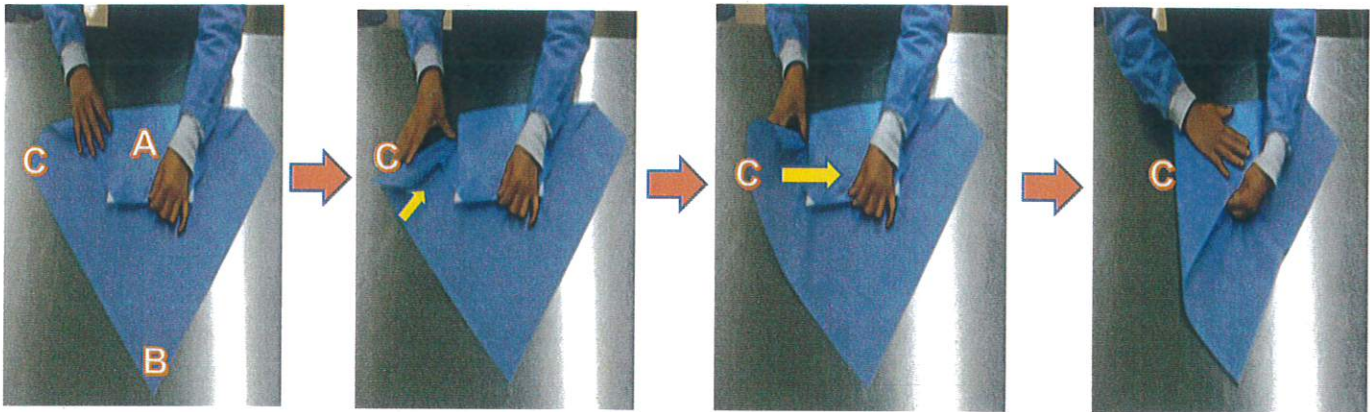


Criterio:

Apretar con la envoltura el material.

5

Del punto D se realiza un pequeño doblez hacia dentro, para formar una pequeña pestaña, sin soltar la pestaña se hará un dobles de izquierda a derecha.

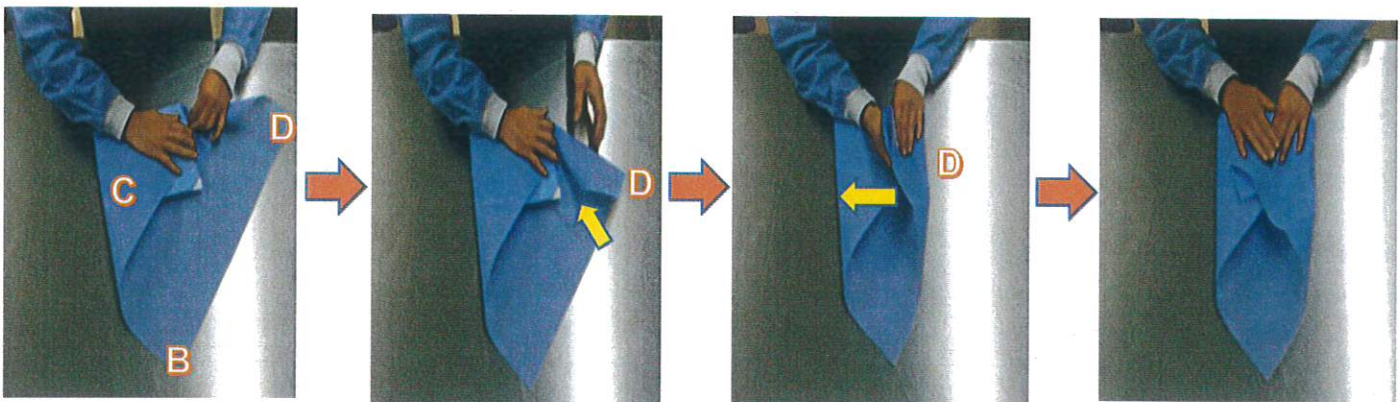

Criterio:

Apretar con la envoltura el material.



PRODUCTO:

**CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL**

CATÁLOGO:

CUT001-02

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR- CUT001-02

6 Dar un pequeño doblé hacia dentro de los puntos C y D para formar la pestaña triangular.



Criterio: Apretar con la envoltura el material sin soltar ningún dobles.

7 Tomar la punta de la pestaña en forma de triángulo (punto B) y doblar por arriba hacia el punto A cubriendo el paquete y sin soltar girar a 180 ° el material.

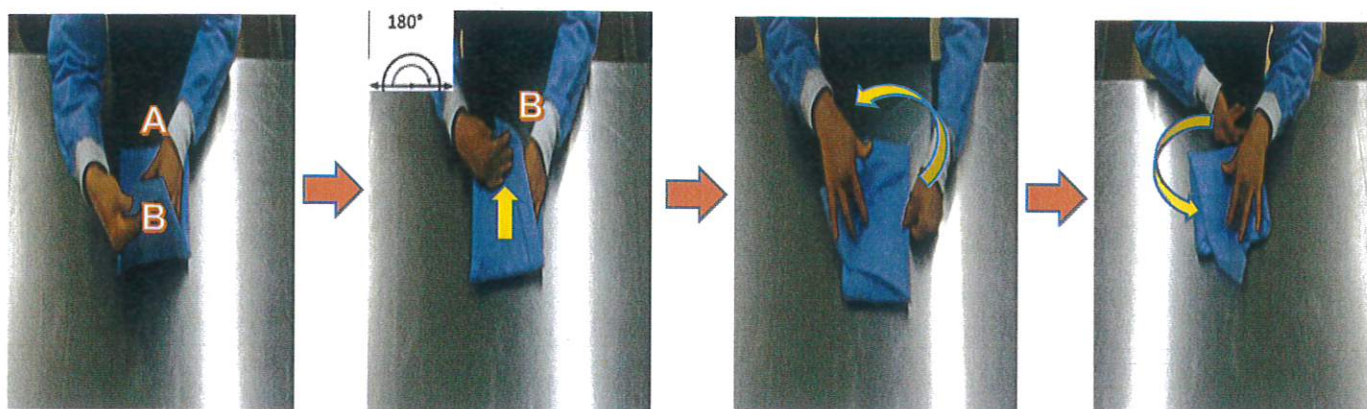

Criterio: Apretar con la envoltura el material sin soltar ningún dobles.



PRODUCTO:

**CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL**

CATÁLOGO:

CUT001-02


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR- CUT001-02

- 8 Tomar la pestaña triangular (punto B) y dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos D y C dejando la punta de la pestaña triangular (referencia) como se muestra en la imagen.

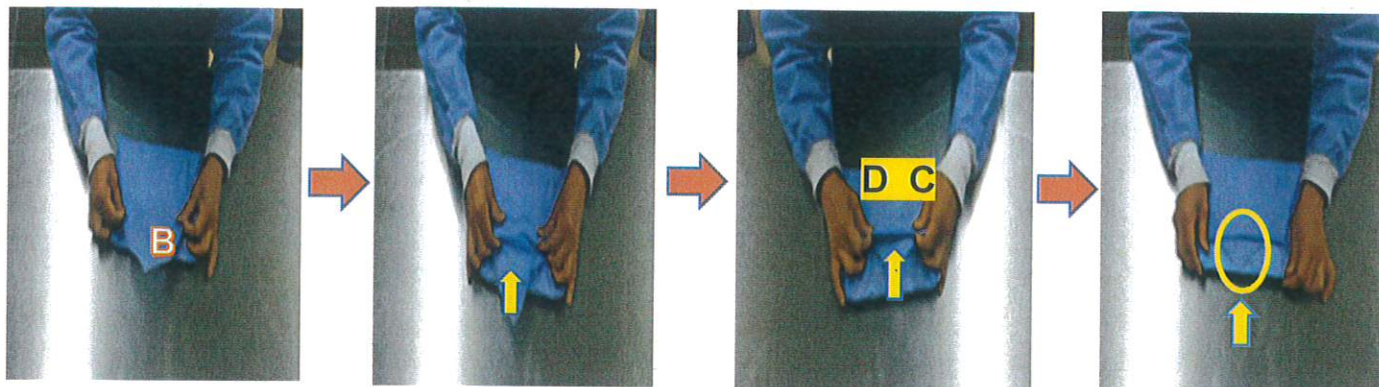

Criterio: Apretar con la envoltura el material sin soltar ningún dobles.

- 9 Resultado final.

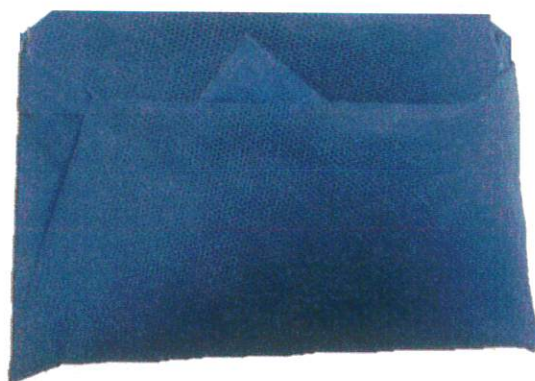

Criterio: No debe quedar flojo.



## INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

|                           |           |          |    |         |                 |
|---------------------------|-----------|----------|----|---------|-----------------|
| PRODUCTO:                 |           |          |    |         |                 |
| CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL |           |          |    |         |                 |
| CATÁLOGO:                 | CUT001-02 | VERSIÓN: | 01 | CÓDIGO: | IEPR- CUT001-02 |

#### 4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

| HISTORICO DE CAMBIOS | VERSIÓN | NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS |
|----------------------|---------|------------------------------|
|                      | 01      | N/A                          |





## INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:

CUT001-02

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-CUT001-02

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Carolina Hernández Hernández  
Producción

FECHA: 09-SEP-2025

IQI. Sergio Bautista Sampedro  
Coordinador de Producción

FECHA: 10-SEP-2025

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva  
Responsable Sanitario

FECHA: 11-SEP-2025

### 1. INSUMOS REQUERIDOS:

| Acondicionamiento Primario                        |   |          |
|---|---|----------|
| Ítem  | Insumo  | Cantidad |
| 1   | Bolsa mixta para esterilizar                        | 1        |
| 2   | Etiqueta primaria                                   | 1        |
| 3   | Cinta indicadora de esterilización (cuando aplique) | 1        |
| Acondicionamiento Secundario                      |   |          |
| 1   | Caja doble corrugado 57x45x33 cm                    | 1        |
| 2   | Etiqueta secundaria                                 | 1        |
| 3   | Cinta indicadora de esterilización                  | 1        |
| Observaciones: Descripciones específicas en la OP |   |          |

### 2. EQUIPO A UTILIZAR:

| Acondicionamiento Primario  |   |
|---|---|
| Descripción   | Parámetros de uso   |
| Selladora de banda  | 180°C a 200°C   |
| Mesa de acero inoxidable  | Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.                |
| Contenedores de manipulación y transporte                           | Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.                         |
| Despachador de cinta indicadora de esterilización ( cuando aplique) | 20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación. |

| Acondicionamiento Secundario   |   |
|--|---|
| Descripción  | Parámetros de uso   |
| Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras) | 20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación. |
| Máquina precintadora   | 46 cm de ancho x 34 cm de altura  |

## PRODUCTO

### CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:

CUT001-02



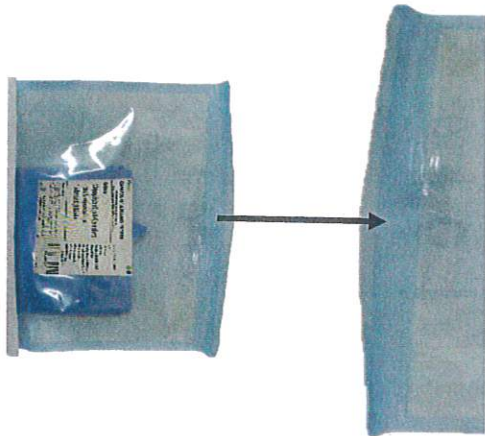

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-CUT001-02

### 3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:
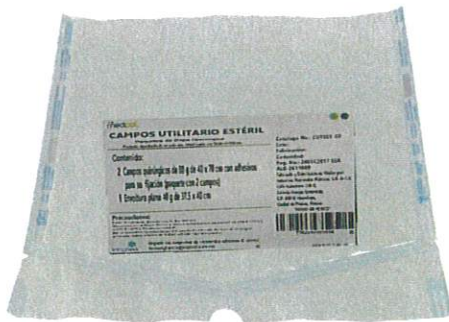
|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1   | Etiquetar el empaque primario (bolsa).   | 2  | Introducir el producto dentro del empaque primario.   |
|    |  |    |   |
| Criterio:   | La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, se coloca de forma horizontal.<br>Nota: la cinta indicadora de esterilización se coloca cuando sea requerido. | Criterio:  | Se introduce el paquete como se muestra en la imagen. |
| 3   | Sellar el empaque primario.  | 4  | Almacenar en contenedores.                            |
|  |  |  |   |
| Criterio:   | No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.   | Criterio:  | Para la manipulación y transporte.                    |



## PRODUCTO

## CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:

CUT001-02

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IAPS-CUT001-02

### 4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1   | Empacar como se muestra en la imagen.   | 2   | Sellar la caja con la maquina precintadora. |
|  |   |  |   |
| Criterio:   | Colocar de frente vs frente cada producto, hacer pares y empaçar la cantidad conforme al factor de empaque. | Criterio:   | Como se muestra en la imagen.               |

|  |  |
|--|--|
| 3  | Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización.<br>En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha.<br>Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario. |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Cinta indicadora de esterilización</p> <p>Identificación de etiqueta caja parcial</p> <p>Sello</p> </div> <div> <p><b>Formato de sello</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <b>COD DD MM AA</b> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>COD:</b> Código de la máquina.         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DD:</b> Día<br/>Los 2 dígitos del día.         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>MM:</b> Mes<br/>Los 2 dígitos del mes.         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>AA:</b> Año<br/>Últimos 2 dígitos del año.         </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>029040425</b> </div> <p><b>EJEMPLO</b></p> </div> </div> |  |
| Criterio:  | El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.  |

## PRODUCTO

### CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:

CUT001-02


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-CUT001-02

- 4 Estibar conforme a la imagen: máximo 6 camas. Seis camas con 4 cajas cada una.

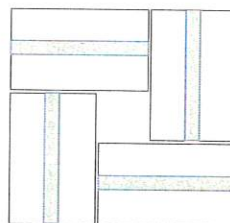

Cama 1

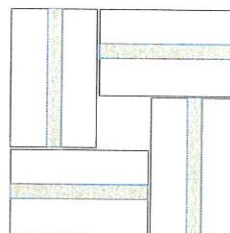

Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100 cm x120 cm

## 5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

| HISTORICO DE CAMBIOS | VERSIÓN | NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS |
|----------------------|---------|------------------------------|
|                      | 01      | N/A                          |