

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:

CDC301-27

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-CDC301-27

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

Nuevo

3 años

ENE - 2029

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Carla

[Signature]

[Signature]

Carolina Hernández Hernández

Producción

FECHA: 05-ENE-2026

IQI. Sergio Bautista Sampedro

Coordinador de Producción

FECHA: 06-ENE-2026

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva

Responsable Sanitario

FECHA: 07-ENE-2026

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Conexión de catéter estéril adulto I		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Campo plano de 35g-45g 30 x 40 cm	1
2	Guantes para exploración medianos	2
3	Gasas 7.5 x 5 cm	10
4	Jeringa desechable sin aguja de 5 ml	1
5	Jeringa desechable sin aguja de 10 ml	1
6	Guantes para exploración medianos	2
Desconexión de catéter estéril adulto I		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Apósito absorbente de 10 x 15 cm	1
2	Gasa 10 x 10 cm	1
3	Tapones luer lock	2
4	Gasas 7.5 x 5 cm	5
5	Guantes para exploración medianos	2
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable.	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique).	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:

CDC301-27

VERSIÓN:



01

CÓDIGO:

IEPR-CDC301-27

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE: CONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

1	Colocar en la mesa de trabajo 1 campo plano de 35g-45g 30 x 40 cm.	2	Colocar 2 guantes para exploración medianos.
			
Criterio:	Se coloca de manera que la costilla quede hacia la parte superior.	Criterio:	Se colocan encima del campo plano de 35g-45g 30 x 40 cm de manera que los dedos apunten al lado izquierdo.

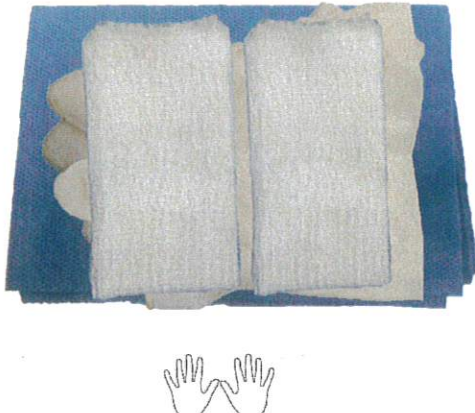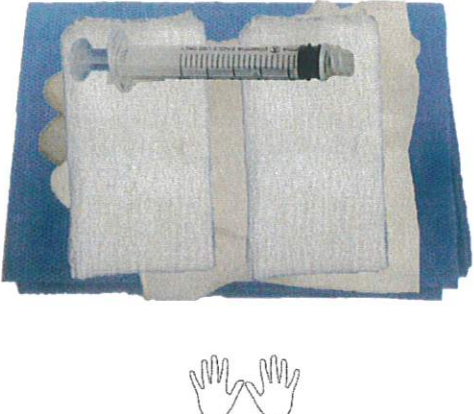3	Colocar 10 gasas 7.5 x 5 cm.	4	Colocar 1 jeringa desechable sin aguja de 5 ml.
			
Criterio:	Se colocan encima de los guantes para exploración medianos dividido en dos partes de manera vertical.	Criterio:	Se coloca encima de las gasas 7.5 x 5 cm de manera horizontal.

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:

CDC301-27


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-CDC301-27

5 Colocar 1 jeringa desechable sin aguja de 10 ml.

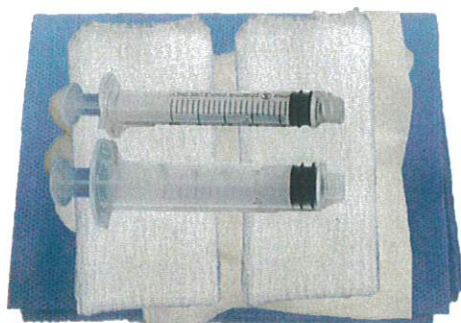

Criterio:

Se coloca encima de las gasas 7.5 x 5 cm abajo de la jeringa desechable sin aguja de 5 ml de manera horizontal.

6 Colocar 2 guantes para exploración medianos.



VISTA FRONTAL



Criterio:

Por último se colocan los guantes quedando encima de las jeringas desechables sin agujas de 5 ml y 10 ml de manera que los dedos apunten al lado izquierdo.

7 Producto terminado de ensamblar.

VISTA FRONTAL



Criterio:

Quedando como se muestra en la imagen al termino del ensamble.

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:

CDC301-27





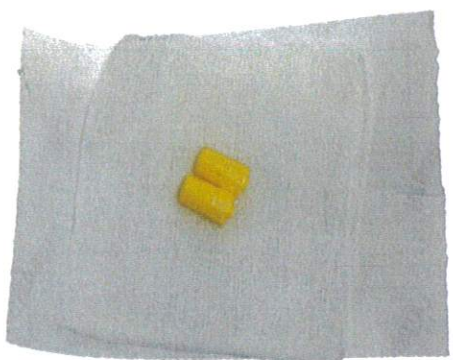

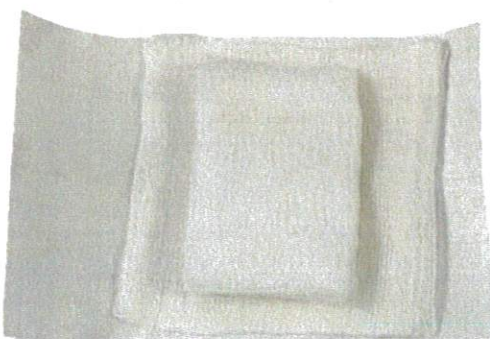

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-CDC301-27

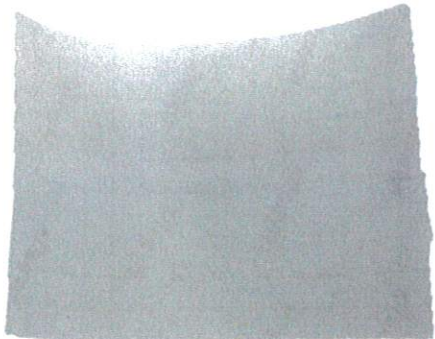4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE: DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

8	Colocar en la mesa de trabajo 1 apósito absorbente de 10 x 15 cm.	9	Colocar 1 gasa 10 x 10 cm.
 		 	
Criterio:	Se coloca de manera horizontal.	Criterio:	Se coloca encima del apósito absorbente de 10 x 15 cm.
10	Colocar en la mesa de trabajo 2 tapones luer lock.	11	Colocar 5 gasas 7.5 x 5 cm.
 		 	
Criterio:	Se colocan encima de la gasa 10 x 10 cm.	Criterio:	Se colocan encima de los tapones luer lock de manera vertical.

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:



CDC301-27


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-CDC301-27

12	Colocar 2 guantes para exploración medianos.	13	Producto final.
		<p>VISTA FRONTAL</p> 	
<p>Criterio:</p> <p>Por último se colocan los guantes quedando encima de las gasas 7.5 x 5 cm de manera que los dedos apunten al lado izquierdo.</p>		<p>Criterio:</p> <p>Como se muestra en la imagen.</p>	

14	Producto terminado de ensamblar.
<p>VISTA FRONTAL</p> 	
<p>Criterio:</p> <p>Quedando como se muestra en la imagen al termino del ensamble.</p>	



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:

CDC301-27

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-CDC301-27

15 El kit no lleva proceso de envoltura.

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.




Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

No mayor a la fecha de caducidad para evitar la proliferación de algún tipo de microbios o bacterias.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:	CDC301-27	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-CDC301-27
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
Nuevo		3 años		ENE-2029	
ELABORÓ:		REVISÓ:		AUTORIZÓ:	
 Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 05-ENE-2026		 IQL Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 06-ENE-2026		 QFB Yazmin Yarely Reyes Silva Responsable Sanitario FECHA: 07-ENE-2026	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	2
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja doble corrugado 54x29x28 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.
Máquina precintadora	30 cm de ancho x 29 cm de altura

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:

CDC301-27







VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-CDC301-27

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa).	2	Introducir el producto dentro del empaque primario.
		<p>Primer embolsado</p>  <p>Segundo embolsado</p> 	
Criterio:	La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad como arrugas, pliegues o cortaduras se coloca de forma horizontal. Verificar que contenga la cinta indicadora de esterilización.	Criterio:	Se introduce el kit como se muestra en la imagen sin soltar ningún insumo.
3	Sellar el empaque primario.	4	Almacenar en los contenedores.
 <p>Primer sellado</p>  <p>Segundo sellado</p>			
Criterio:	No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Para la manipulación y transporte.

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:

CDC301-27



VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IAPS-CDC301-27

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen.	2	Sellar la caja con la maquina precintadora.
			
Criterio:	Doblar a la mitad colocándolos de frente vs frente cada producto, hacer pares de lados contrarios y empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización. En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha. Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Identificación de etiqueta caja parcial</p> <p>Sello</p> <p>Cinta indicadora de esterilización</p> </div> <div> <p>Formato de sello</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> COD DD MM AA </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> COD: Código de la máquina. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> DD: DIA Los 2 dígitos del día. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> MM: MES Los 2 dígitos del mes. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año. </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;"> 029040425 </div> <p>EJEMPLO</p> </div> </div>	
Criterio:	El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.

PRODUCTO:

KIT PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATÉTER ESTÉRIL ADULTO I

CATÁLOGO:

CDC301-27


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-CDC301-27

- 4 Estibar conforme a la imagen: máximo 7 camas. Seis camas con 7 cajas cada una y una cama con 8 cajas.

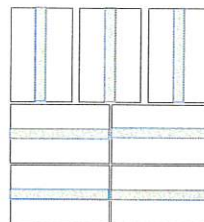

Cama 1

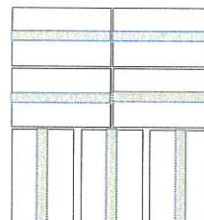

Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100 cm x120 cm

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A