



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

CAMPOS SENCILLO

CATÁLOGO:

CUS035-26

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-CUS035-26

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

NUEVO

3 años

NOV-2028

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Carolina Hernández Hernández
Producción

FECHA: 10-NOV-2025

IQI. Sergio Bautista Sampedro
Coordinador de Producción

FECHA: 11-NOV-2025

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva
Responsable Sanitario

FECHA: 12-NOV-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Campo sencillo 35g de 90 x 90 cm	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable.	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique).	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

CAMPOS SENCILLO

CATÁLOGO:

CUS035-26

VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IEPR-CUS035-26

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

1 Colocar en la mesa de trabajo el campo sencillo 35g de 90 x 90 cm.

VISTA DELANTERA

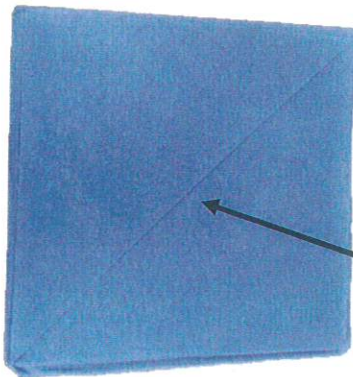

Referencia



VISTA TRASERA



Criterio: Revisar que tenga la referencia y que no esté contaminado.

2 No lleva proceso de envoltura.

4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.
 No se exponga a la humedad mayor a 65%.
 Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A



INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

CAMPOS SENCILLOS

CATÁLOGO:

CUS035-26

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-CUS035-26

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

Nuevo

3 años

NOV - 2028

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Carolina Hernández Hernández

Producción

FECHA: 10-NOV-2025

IQI. Sergio Bautista Sampedro

Coordinador de Producción

FECHA: 11-NOV-2025

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva

Responsable Sanitario

FECHA: 12-NOV-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja doble corrugado 57x45x33 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.
Máquina precintadora	46 cm de ancho x 34 cm de altura

COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO

CAMPOS SENCILLOS

CATÁLOGO:

CUS035-26




VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-CUS035-26

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa).	2	Introducir el producto dentro del empaque primario.
			
Criterio:	La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, se coloca de forma horizontal. Nota: la cinta indicadora de esterilización se coloca cuando sea requerido.	Criterio:	Se introduce como se muestra en la imagen.
3	Sellar el empaque primario.	4	Almacenar en contenedores.
			
Criterio:	No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Para la manipulación y transporte.

PRODUCTO

CAMPOS SENCILLOS

CATÁLOGO:

CUS035-26



VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IAPS-CUS035-26

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

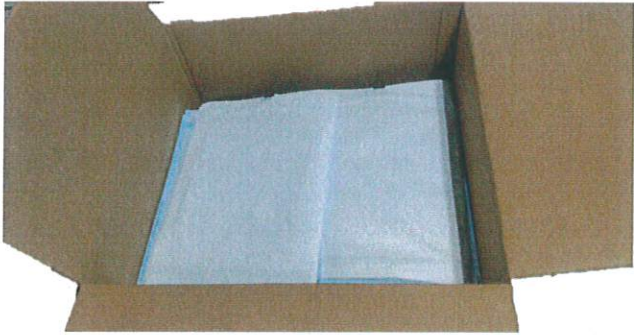1	Empacar como se muestra en la imagen.	2	Sellar la caja con la maquina precintadora.
			
Criterio:	Colocar de frente vs frente cada producto, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.


3	<p>Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización. En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha. Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="121 1297 750 1696">  <p>Identificación de etiqueta caja parcial</p> <p>Cinta indicadora de esterilización</p> <p>Sello</p> </div> <div data-bbox="841 1276 1442 1738"> <p>Formato de sello</p> <p>COD DD MM AA</p> <table border="1"> <tr> <td>COD: Código de la máquina.</td> <td>DD: DIA Los 2 dígitos del día.</td> <td>MM: MES Los 2 dígitos del mes.</td> <td>AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año.</td> </tr> </table> <p>029040425</p> <p>EJEMPLO</p> </div> </div>	COD: Código de la máquina.	DD: DIA Los 2 dígitos del día.	MM: MES Los 2 dígitos del mes.	AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año.
COD: Código de la máquina.	DD: DIA Los 2 dígitos del día.	MM: MES Los 2 dígitos del mes.	AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año.		
Criterio:	El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.				

PRODUCTO

CAMPOS SENCILLOS

CATÁLOGO:	CUS035-26	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-CUS035-26
-----------	-----------	----------	----	---------	----------------

4 Estibar conforme a la imagen: máximo 6 camas. Seis camas con 4 cajas cada una.

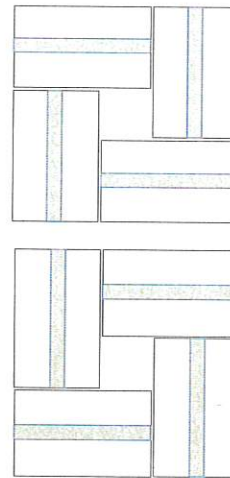

Cama 1

Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100 cm x120 cm.

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se exponga a la humedad mayor a 65%.
- Empaque primario frágil manipular con cuidado.
- Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A