



# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

**DESCONEXIÓN DE CATETER HEMODIÁLISIS VII**

CATÁLOGO:

DCM302-22

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-DCM302-22

SUSTITUYE A:

Nuevo

VIGENCIA:

3 años

PROXIMA REVISIÓN:

ENE-2028

ELABORÓ:

Ana Lilia Pastenes Santamaría  
Producción  
FECHA: 07-ENE-2025

REVISÓ:

IQI. Sergio Bautista Sampedro  
Coordinador de Producción  
FECHA: 08-ENE-2025

AUTORIZÓ:

II. Alan Christian Galicia Castillo  
Responsable Sanitario  
FECHA: 09-ENE-2025

## 1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Apósitos absorbentes de 10 x 15 cm	2
2	Toallas impregnadas alcohol isopropilico al 70%	4
3	Gasas 10 x 10 cm	3
4	Tapones luer lock	2
5	Campo plano 35g-40g 37.5 x 40 cm	1
6	Guantes para exploración medianos	2
Observaciones: Descripciones especificas en la OP		

## 2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable.	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique).	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

**COPIA CONTROLADA**

No. 1

**PRODUCTO:**

**DESCONEXIÓN DE CATETER HEMODIÁLISIS VII**

CATÁLOGO:

DCM302-22


VERSIÓN:





01

CÓDIGO:

IEPR-DCM302-22

**3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:**

1	Colocar en la mesa de trabajo 2 apósitos absorbentes de 10 x 15 cm.	 	2	Colocar 4 toallas impregnadas alcohol isopropilico al 70%.	 
Criterio:	Se colocan de forma horizontal.	Criterio:	Se colocan encima de los apósitos absorbentes de 10 x 15 cm.		

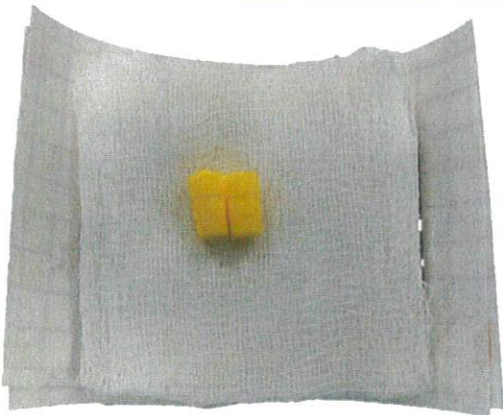3	Colocar 3 gasas 10 x 10 cm.	 	4	Colocar 2 tapones luer lock.	 
Criterio:	Se colocan encima de las toallas impregnadas alcohol isopropilico al 70%.	Criterio:	Se colocan encima de las gasas 10 x 10 cm.		

PRODUCTO:

DESCONEXIÓN DE CATETER HEMODIÁLISIS VII

CATÁLOGO:




DCM302-22

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-DCM302-22

5	Colocar 1 campo plano 35g-40g 37.5 x 40 cm.	6	Colocar 2 guantes para exploración medianos.
 		 	
Criterio:	Se coloca encima de los tapones luer lock.	Criterio:	Por último se colocan los guantes quedando encima del campo plano de 35g-40g 37.5 x 40 cm de manera que los dedos apunten al lado izquierdo.

7	Producto final.
<p style="text-align: center;">VISTA FRONTAL</p>  	
Criterio:	Como se muestra en la imagen.

PRODUCTO:

DESCONEXIÓN DE CATETER HEMODIÁLISIS VII

CATÁLOGO:

DCM302-22

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR-DCM302-22

8 Producto terminado de ensamblar.

VISTA FRONTAL

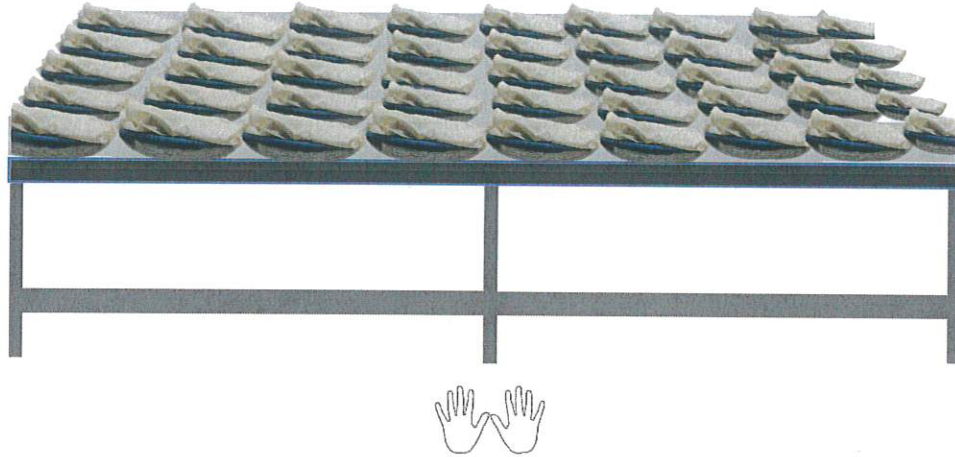

Criterio:

Quedando como se muestra en la imagen al termino del ensamble.

9 El kit no lleva proceso de envoltura.

4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

No mayor a la fecha de caducidad para evitar la proliferación de algún tipo de microbios o bacterias.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A

<b>PRODUCTO:</b>					
<b>DESCONEXIÓN DE CATETER HEMODIÁLISIS VII</b>					
CATÁLOGO:	DCM302-22	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-DCM302-22
<b>SUSTITUYE A:</b>		<b>VIGENCIA:</b>		<b>PROXIMA REVISIÓN:</b>	
Nuevo		3 años		ENE - 2028	
<b>ELABORÓ:</b>		<b>REVISÓ:</b>		<b>AUTORIZÓ:</b>	
 Ana Lilia Pastenes Santamaría Producción FECHA: 07-ENE-2025		 I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 08-ENE-2025		 I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 09-ENE-2025	

**1. INSUMOS REQUERIDOS:**

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja doble corrugado 54x29x28 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		


**2. EQUIPO A UTILIZAR:**

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.
Máquina precintadora	30 cm de ancho x 29 cm de altura

PRODUCTO: <b>DESCONEXIÓN DE CATETER HEMODIÁLISIS VII</b>					
CATÁLOGO:	DCM302-22	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-DCM302-22

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa).		2	Introducir el producto dentro del empaque primario.	
Criterio:	La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad como arrugas, pliegues o cortaduras se coloca de forma horizontal. Nota: la cinta indicadora de esterilización se coloca cuando sea requerido.	Criterio:	Se introduce el kit como se muestra en la imagen sin soltar ningún insumo.		
3	Sellar el empaque primario.		4	Almacenar en los contenedores.	
Criterio:	No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Para la manipulación y transporte.		

PRODUCTO:

**DESCONEXIÓN DE CATETER HEMODIÁLISIS VII**

CATÁLOGO:

DCM302-22



VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IAPS-DCM302-22

**4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:**

1	Empacar como se muestra en la imagen.	2	Sellar la caja con la maquina precintadora.
			
Criterio:	Colocar frente vs frente cada producto, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización. En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha. Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.
 <p>Identificación de etiqueta caja parcial</p> <p>Cinta indicadora de esterilización</p> <p>Sello</p>	<p><b>Formato de sello</b></p> <p><b>COD DD MM AA</b></p> <p>COD: Código de la máquina.</p> <p>DD: DIA Los 2 dígitos del día.</p> <p>MM: MES Los 2 dígitos del mes.</p> <p>AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año.</p> <p><b>029040425</b></p> <p><b>EJEMPLO</b></p>

Criterio:	El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.
-----------	---

**PRODUCTO:**

**DESCONEXIÓN DE CATETER HEMODIÁLISIS VII**

CATÁLOGO:

DCM302-22


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-DCM302-22

4 Estibar conforme a la imagen: máximo 7 camas. Seis camas con 7 cajas cada una y una cama con 8 cajas.

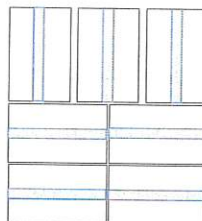

Cama 1

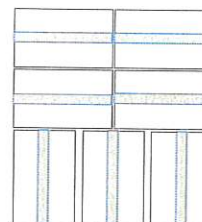

Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100 cm x120 cm

**5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:**

- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se exponga a la humedad mayor a 65%.
- Empaque primario frágil manipular con cuidado.
- Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A